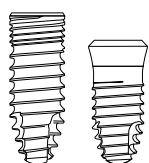




Surgical Guide System

FINESIA[®]

Relios



**Bone Level
Tissue Level**



てき しん 的 心

それは弓道における的の中心のこと。

弓道には“せいしゃ ひっちゅう正射必中”という言葉があります。

これは正しい射法で射られた矢は、必ずあた中するという意味です。

患者さまのためを考え診査診断を行い、目標とする位置

『的心』にインプラント体を埋入する。

我々は、『的心』へ、より正確なインプラント治療の

一助になりたいとの思いを込めています。

Contents

ご使用の前に	3~4
--------------	-----

術式フロー

STEP 1 CT撮影	5
STEP 2 3D治療計画	5
STEP 3 FINESIA専用サージカルガイドステント製作.....	5
STEP 4 術 式	6~10
STEP 5 埋 入	11~13

メンテナンス.....	14
-------------	----

インプラント体とサージカルガイドステント適用表

Tapered type	16
Straight type	16

製品リスト.....	17~29
------------	-------

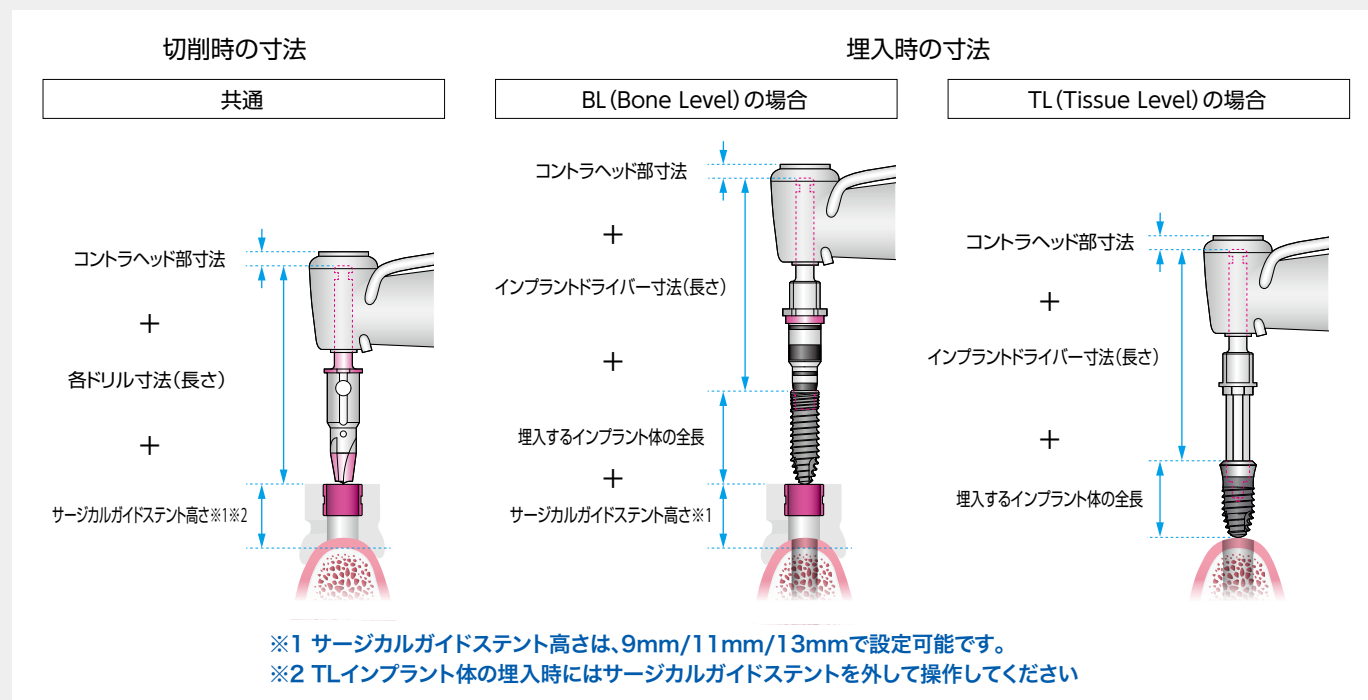
ご使用の前に

- 治療計画時には開口量を測定し、FINESIA Relios Surgical Guide Systemが適応可能か確認してください。
(開口量の測定時は、次の「切削時の寸法」と「埋入時の寸法」にご注意ください)

切削時の寸法：コントラヘッド部寸法 + 各ドリル寸法 + サージカルガイドステント高さ※1


埋入時の寸法(BL)：コントラヘッド部寸法 + インプラントドライバー寸法 + 埋入するインプラント体の全長 + サージカルガイドステント高さ※1

埋入時の寸法(TL)：コントラヘッド部寸法 + インプラントドライバー寸法 + 埋入するインプラント体の全長



- 当社インプランターNeoシリーズを使用の場合、内部注水用ノズルは、サイズM(20mm)を使用してください。
ただし、Neo BRIGHT、Neo Black、Neo Plusでタップフォーマーを使用する場合は、サイズL(23mm)を使用してください。
それ以外のインプラントモーターを使用の場合は、各メーカーへお問い合わせください。
- オペ前に、各ドリルの内部注水口から正常に注水されることを口腔外で確認してください。
- 形成したインプラント窩に適したインプラントサイズを選定してください。

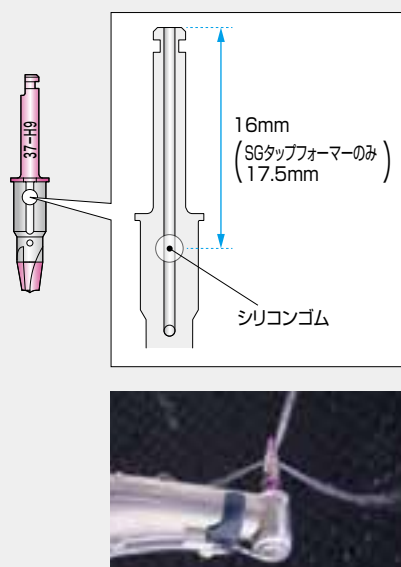内部注水ドリルの仕様




- シリコンゴムは、パッキンの役割を果たして注水の逆流を防ぎます。
- ノズル挿入時、ノズルがシリコンゴムまで挿入されていることを確認してください。
(ノズル先端がシリコン部に圧入されている感触を感じながら奥までノズルを挿入してください)
- SGプレパイロットドリル、SGパイロットドリル、SGステップドリル、SGファイナルドリル、SGタップフォーマー、SGプロファイルドリルは内部注水仕様となっています。
- SGティッシュパンチは内部注水仕様ではありませんが、内部注水用ノズルをコントラチャック部に収納できます。

注) 注水口(3口)から正常に注水されることを口腔外で確認してください。


(単位: mm)

コントラヘッド部寸法

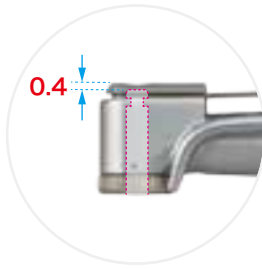
インプランター Neo



インプランター Neo BRIGHT

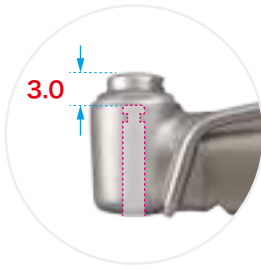

インプランター Neo Black
Neo Plus

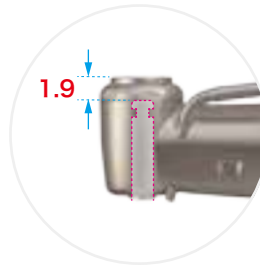


インプランター Neo Plus2




(単位: mm)

各種寸法(長さ)一覧

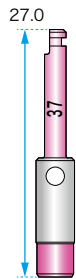
SGティッシュパンチ




SGプレパイロットドリル

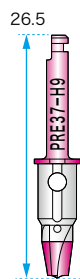


SGパイロットドリル

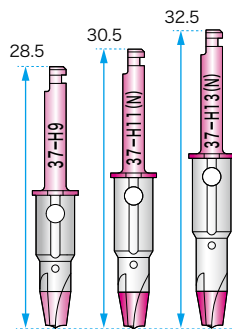


SGステップドリル

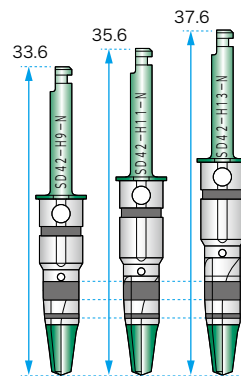


SGファイナルドリルTP

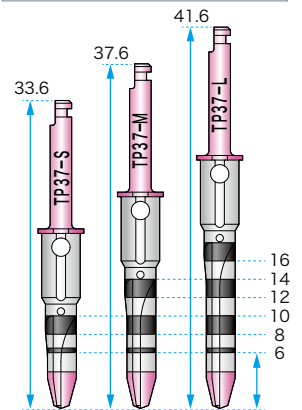


SGファイナルドリルST

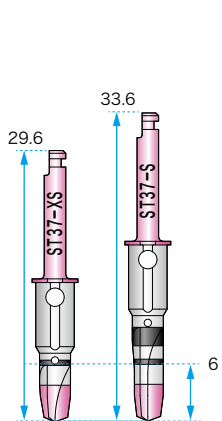


SGタップフォーマーTP

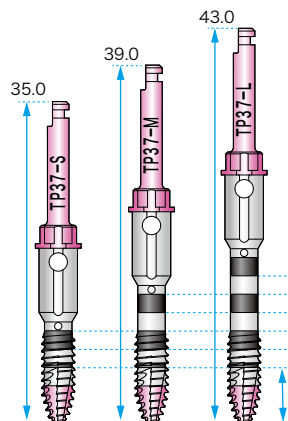

SGタップフォーマーST

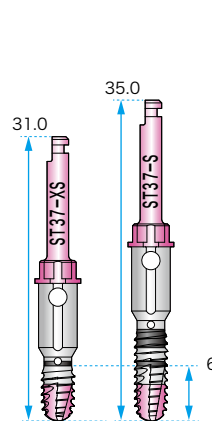


SG プロファイルドリル

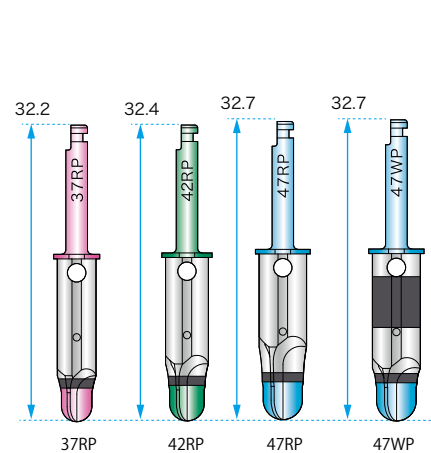


(単位: mm)

インプラントドライバー寸法(長さ)

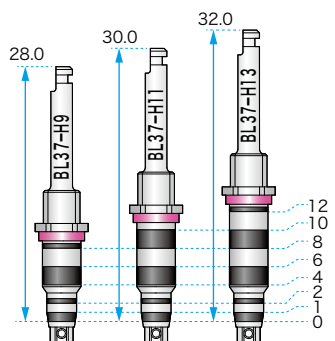
SG BLインプラントドライバー



SG BLインプラントドライバーWH

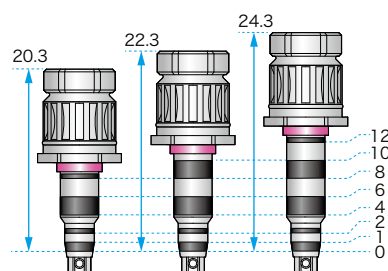

TLインプラントドライバーCH

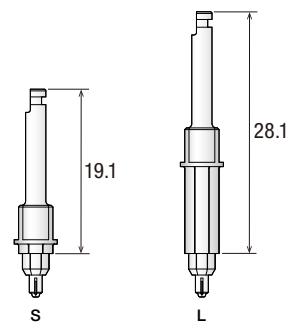

注) SGプロファイルドリルを除き、ドリル、ドライバーの長さは直径に関わらず同一です。

術式フロー



STEP 1 CT 撮影

CT撮影用ステントを準備の上、医科用CTまたはコンビームCTで撮影を行います。

注) オペ時の口腔内と同じ状態でCT撮影されることが理想です。



STEP 2 3D 治療計画

撮影したCT画像を当社指定のシミュレーションソフト用データに変換し、3D画像を作成します。シミュレーションソフト上でインプラントを配置し治療計画を立案します。計画立案後は、シミュレーションソフトを医師、ラボ、患者とのコミュニケーションツールとして使います。

注1) 治療計画には、当社指定のシミュレーションソフトを使用してください。

また、使用に当たっては、シミュレーションソフトメーカーの操作マニュアルを参照してください。

注2) 当社指定のサージカルガイドステント製作メーカーとそのシミュレーションソフトに関しては、当社にお問い合わせください。

注3) インプラント体のサイズ選択と埋入位置については「FINESIA Relios 外科マニュアル」を参照してください。



STEP 3 FINESIA専用サージカルガイドステント製作

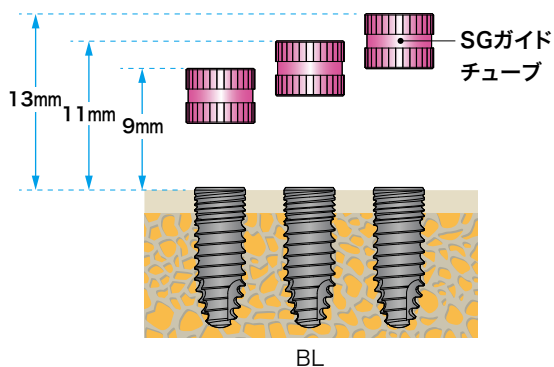
骨支持タイプ、粘膜支持タイプ、歯牙支持タイプより固定方法を選択し、サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmの3種類から、術式に合ったサージカルガイドステントを製作します。

サージカルガイドステントの固定方法




SGガイドチューブポジション

サージカルガイドステントの固定方法や軟組織の厚さ等によってSGガイドチューブポジションが決まります。



BL

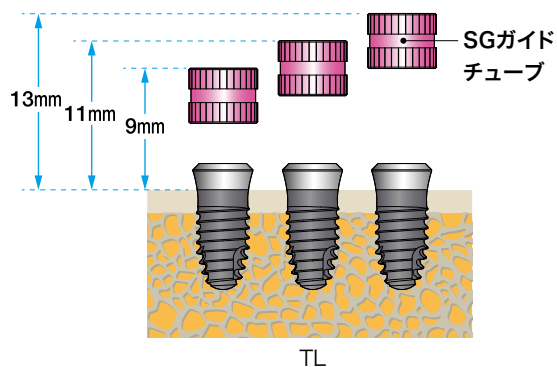

TL

STEP 4

術式

1 SGティッシュパンチ



パンチ回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切除してください。

歯肉のみ切除するドリル。

先端径は、インプラント径より0.3mm大きい設計。

例) SGティッシュパンチ37 → 先端径φ4.0(対象インプラント径φ3.7)

注) トルク20N・cm以下、回転数20rpmで使用してください。

内部注水用ノズルを装着のまま、コントラチャック部への取付けが可能です。

2 SGプレパイロットドリル/SGパイロットドリル



ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。
ドリルのガイド部がガイドチューブに入っていることを確認してドリリングしてください。

骨面から深さ3.5mmおよび5.5mmまでドリリングできるスターティングドリル。皮質骨を切削する役割。

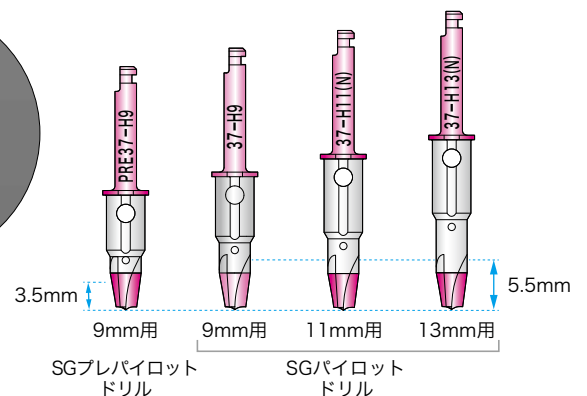
【内部注水式】

注) トルク20N・cm以下、回転数800～1200rpmで使用してください。

サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のドリルを使用してください。



ドリルの刃先形状
(スイープカット)



※9mmの高さのサージカルガイドにおいてはSGプレパイロットドリルを使用後SGパイロットドリルを使用します。

インプラント径φ4.2mm、φ4.7mmではSGステップドリルが必要です。

SGステップドリル



ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

ドリルのガイド部がガイドチューブに入っていることを確認してドリリングしてください。

2mm



SGストッパーリング

SGストッパーリングとの組み合わせで切削可能な埋入深さはReliosサージカルガイド用術式チャートを参照ください。

インプラント窩を形成する際に順次拡大するためのドリル。

【内部注水式】

注) トルク20N・cm以下、回転数800～1200rpmで使用してください。

ATTENTION

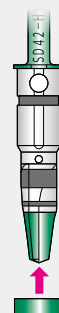
装着時の注意点

SGストッパーリングの組み付け注意事項


ドリルの中心軸に対し、SGストッパーリングを垂直に装着してください。

対象:

SGステップドリル
SGファイナルドリル
SGタップフォーマー
SGプロファイルドリル



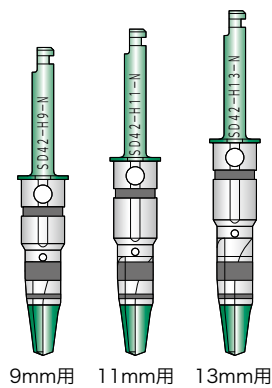サージカルガイドステント高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のドリルを使用してください。



9mm用

11mm用

13mm用



STEP 4 術式

3 SGファイナルドリル



ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

ドリルのガイド部がガイドチューブに入っていることを確認してドリリングしてください。

インプラント窩形成に使用するドリル。

【内部注水式】

注) トルク20N・cm以下,回転数800~1200rpmで使用してください。



SGストッパーリング

SGストッパーリングとの組み合わせで切削可能な埋入深さはReliosサージカルガイド用術式チャートを参照ください。

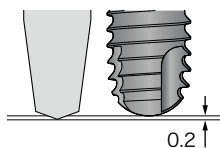
(単位: mm)

ドリル先端仕様

ドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル


φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い



SGファイナルドリルTP


φ3.2 φ3.4 φ3.7 → 0.1長い

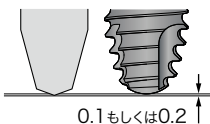φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い



SGファイナルドリルST

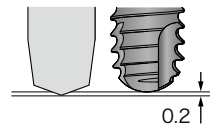φ3.7 φ4.2 φ4.7 φ5.2 → 0.2長い



STEP 4 術式

4 SGタップフォーマー



タップフォーマー回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。
ドリルのガイド部がガイドチューブに入っていることを確認してドリリングしてください。



骨質が硬い場合、インプラント径に応じてタップを形成する器具。

【内部注水式】

注) トルク70N・cm以下、回転数20rpmで使用してください。

直径5.2mmのインプラント体埋入時は、通常の骨質の場合でも必ずタップフォーマーを使用してください。

タップ形成の際、骨質が硬い場合は2～3回戻し、再度タップ形成を行ってください。

ATTENTION

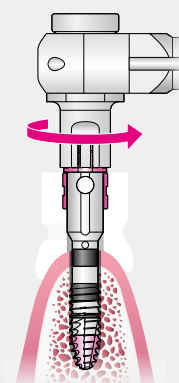
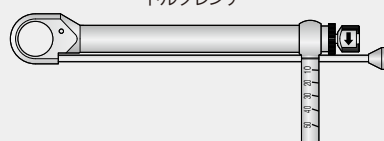
SGタップフォーマーが骨を噛み込んだ時の対処方法

SGタップフォーマーが骨を噛み込んだ場合は、FDアダプタをSGタップフォーマーの四角ヘッドに組み付け、トルクレンチで逆回転させてください。

FDアダプタ



トルクレンチ



5 SGガイドアンカー



多数歯の症例の際、サージカルガイドステントを固定する器具。
インプラント窩の深さ・方向を確認することにも使用可能。

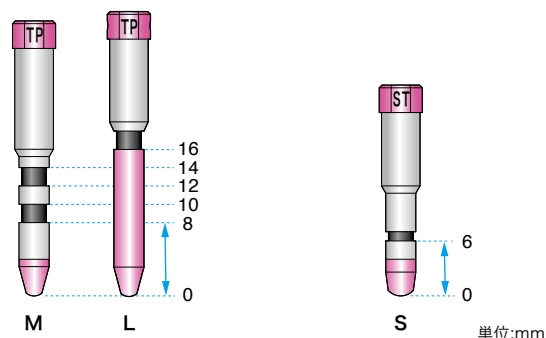
インプラント窩の深さ確認方法

- ステント付の場合 埋入深度を示した溝をX線写真またはCT画像で確認してください。
- ステントを外した場合 埋入深度を示したレーザーマーキングを目視で確認してください。

SGガイドアンカーTP

SGガイドアンカーST

- TPの場合 骨内長8～14mmはMサイズ、16mmはLサイズを使用してください。
- STの場合 Sサイズを使用してください。



TL (Tissue Level) GH1.5ではSGプロファイルドリルが必要です。

SGプロファイルドリル




GH1.5のカラー部に対応した埋入窩を形成するドリル。

【内部注水式】

注) トルク20N・cm以下,回転数800~1200rpmで使用してください。

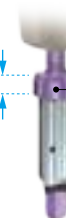2mm



SGストッパーリング

SGストッパーリングとの組み合わせについては、Reliosサージカルガイド用術式チャートを参照ください。

ドリル回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら切削してください。

ドリルのガイド部がガイドチューブに入っていることを確認してドリリングしてください



STEP 5 埋入

BL(Bone Level)の場合

SG BLインプラントドライバー



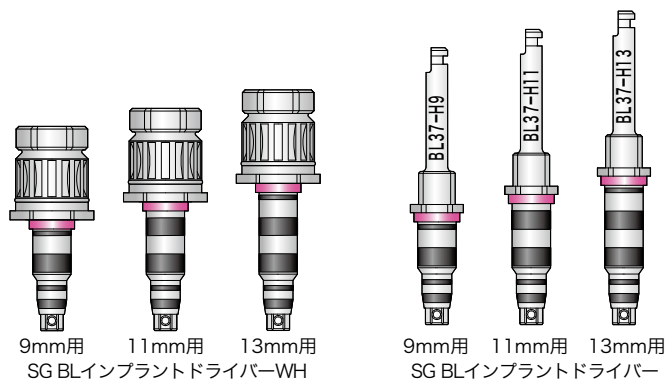
ドライバー回転時、ガイドチューブとガイド部との異常音がないことを確認しながら埋入してください。

インプラント体を埋入する器具。

注) トルク: 最初の設定20N・cm (50N・cm以下の範囲で徐々にトルクを上げてください) 回転数: 20rpm以下で使用してください。

サージカルガイドストent高さ9mm、11mm、13mmに合わせて、専用のインプラントドライバーを使用してください。


埋入トルクが50N・cmを超える場合、インプラント体を一度除去し、SGタップフォーマーでタップ形成を行った後、再度インプラント体を埋入してください。



ATTENTION

インプラント体嵌合部内部の方向確認方法

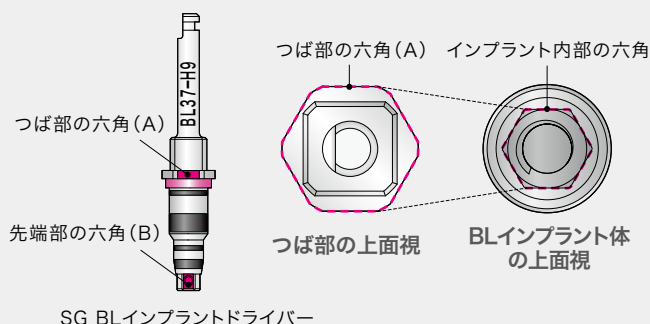SG BLインプラントドライバーの先端部の六角(B)とつば部の六角(A)面は同じ向きのため、埋入時につば部の六角(A)を見ながらインプラント体内部の六角向きが調整できます。





BL(Bone Level)の場合

ATTENTION

インプラント体のピックアップ

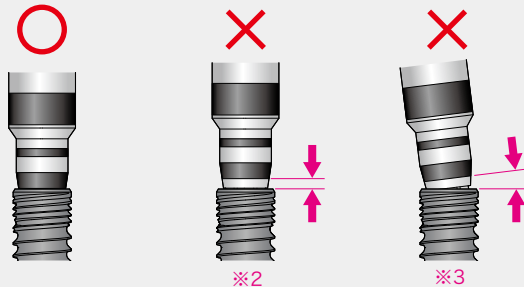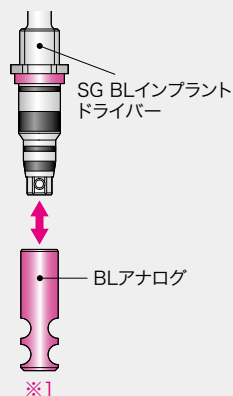- ① 使用前に、インプラント体把持部にアナログ等を適合させて、把持機能が正常に作用することを確認してください。^{※1}
- ② 本製品とインプラント体を組み合わせる際は、まっすぐ所定の位置まで(奥まで)挿入し、しっかりと固定されていることを確認してください。固定されない場合は、器具及びインプラント体破損の恐れがあります。^{※2}
- ③ 本製品を使用する際は、本製品の中心軸がインプラント体と同軸になっていることを確認してください。同軸でない場合は、器具及びインプラント体破損の恐れがあります。^{※3}





ATTENTION

インプラントモータを使用しない場合の埋入方法

トルクレンチでインプラント体を埋入する場合は SG BLインプラントドライバー-WHを使用してください。

インプラント体嵌合部内部の方向確認方法

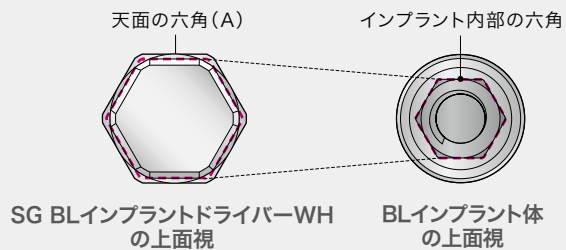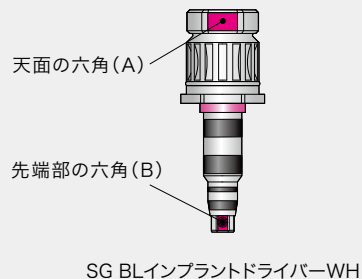
SG BLインプラントドライバー-WHの先端部の六角(B)と天面の六角(A)面は同じ向きのため、埋入時に天面の六角(A)を見ながらインプラント体内部の六角向きが調整できます。



STEP 5 埋入

TL(Tissue Level)の場合

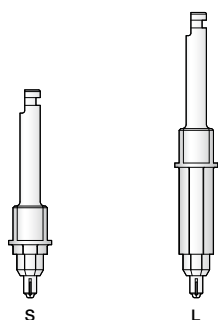TLインプラントドライバー



インプラント体を埋入する器具。

注) 埋入方法は「FINESIA Relios
外科マニュアル」を参照してください。



FINESIA Relios
外科マニュアル


サージカルガイドステントは外して使用してください。

インプラント体の粗面が露出する場合の注意点

- インプラント体のカラー部に干渉する骨がSGプロファイルドリルでは除去できず、公称骨レベル以下の粗面が露出 する場合があります (図1)。
その際は、必要に応じてSGプロファイルドリルではなくプロファイルドリル (図3) で干渉骨の除去を行ってください (図2)。

図1：粗面が露出してしまう場合

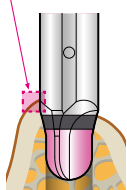SGプロファイルドリルでは
除去できない部分



粗面が露出してしまう
埋入例

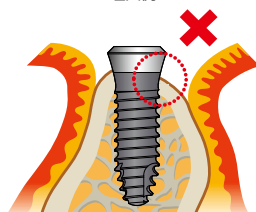


図2：公称骨レベルのドリル位置


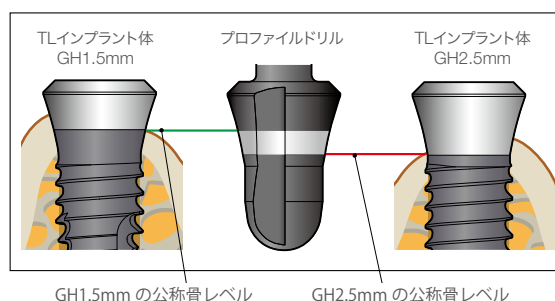


図3：プロファイルドリル

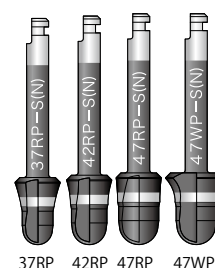

ATTENTION

- Relios (FINESIA BE) 用のプロファイルドリルをご使用ください。
プロファイルドリルの先端が丸く、(N) のマーキングがある
ことを確認してください



- 埋入するインプラント体のカラー部高さの公称骨レベルに対応した目盛りを確認してください。
不適当な目盛りのラインを選択すると、干渉する骨を十分に除去できない、あるいは必要以上
に除去してしまい、インプラント体の適切な埋入ができなくなります。



(参考：FINESIA AO/HA 用)

メンテナンス

内部注水ドリルの清掃方法



内部注水口の洗浄

コップなどに精製水を入れ、内部注水ノズルを通して注水させてください。
注）内部注水ドリル内に生理食塩水などが残留していると詰まりの原因となります。



ノズル清掃針

ドリルの注水口に詰まりがある場合は、ノズル清掃針（CDM03509）などで清掃してください。

さらに奥の清掃については、当社にお問い合わせください。

器具オートクレーブ滅菌条件

本製品は未滅菌であり、口腔内で使用する前に必ず洗浄および滅菌を行ってから、使用してください。

- ・ 滅菌条件例
（第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2.滅菌法 2.1.加熱法
（i）高圧蒸気法による。保持温度及び保持時間は右表参照で行ってください。）

オートクレーブ条件	
保持温度	保持時間
121～124℃	15分間
126～129℃	10分間

インプラント体とサージカルガイドステント適用表

製品リスト



インプラント体とサージカルガイドステント適用表 **Tapered type**

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm

(単位: mm)

			インプラント径					
			φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長	8	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●
		12	●	●	●	●	●	●
		14	●	●	●	●	●	●
		16	—	—	●	●	●	●
		18	—	—	×	×	×	×

BL: Bone Level

サージカルガイドステント高さ 13mm

(単位: mm)

			インプラント径					
			φ3.2	φ3.4	φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長	8	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●
		12	●	●	●	●	●	●
		14	●	●	●	●	●	●
		16	—	—	×	×	×	×
		18	—	—	×	×	×	×

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm / 13mm

(単位: mm)

			インプラント径		
			φ3.7	φ4.2	φ4.7
TL	骨内長	8	●	●	●
		10	●	●	●
		12	●	●	●

TL: Tissue Level

インプラント体とサージカルガイドステント適用表 **Straight type**

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm

(単位: mm)

			インプラント径			
			φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長	6	●	●	●	●

BL: Bone Level

サージカルガイドステント高さ 13mm

(単位: mm)

			インプラント径			
			φ3.7	φ4.2	φ4.7	φ5.2
BL	骨内長	6	●	●	●	●

サージカルガイドステント高さ 9mm / 11mm / 13mm

(単位: mm)

			インプラント径		
			φ3.7	φ4.2	φ4.7
TL	骨内長	6	●	●	●

TL: Tissue Level


- : サージカルガイドステントに対応
- ×: サージカルガイドステントに非対応
- : インプラント体ラインナップなし

SGガイドチューブ

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-GUIDE TUBE32 ※	BCDI13101
		SG-GUIDE TUBE32 (50P)	BCDI13111
φ3.4		SG-GUIDE TUBE34 ※	BCDI13102
		SG-GUIDE TUBE34 (50P)	BCDI13112
φ3.7		SG-GUIDE TUBE37 ※	BCDI13103
		SG-GUIDE TUBE37 (50P)	BCDI13113
φ4.2		SG-GUIDE TUBE42 ※	BCDI13104
		SG-GUIDE TUBE42 (50P)	BCDI13114
φ4.7		SG-GUIDE TUBE47 ※	BCDI13105
		SG-GUIDE TUBE47 (50P)	BCDI13115
φ5.2		SG-GUIDE TUBE52 ※	BCDI13106
		SG-GUIDE TUBE52 (50P)	BCDI13116

※2個入り

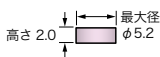SGストッパーリング

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-STOPPER RING32	BCDI13121
φ3.4		SG-STOPPER RING34	BCDI13122
φ3.7		SG-STOPPER RING37	BCDI13123
φ4.2		SG-STOPPER RING42	BCDI13124
φ4.7		SG-STOPPER RING47	BCDI13125
φ5.2		SG-STOPPER RING52	BCDI13126

製品リスト

SGティッシュパンチ

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-T PUNCH32	BCDI13131
φ3.4		SG-T PUNCH34	BCDI13132
φ3.7		SG-T PUNCH37	BCDI13133
φ4.2		SG-T PUNCH42	BCDI13134
φ4.7		SG-T PUNCH47	BCDI13135
φ5.2		SG-T PUNCH52	BCDI13136

SGプレパイロットドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-PREPILOTDRILL32-SH9	BCDI13463
φ3.4		SG-PREPILOTDRILL34-SH9	BCDI13466
φ3.7		SG-PREPILOTDRILL37-SH9	BCDI13469
φ4.2		SG-PREPILOTDRILL42-SH9	BCDI13472
φ4.7		SG-PREPILOTDRILL47-SH9	BCDI13475
φ5.2		SG-PREPILOTDRILL52-SH9	BCDI13478







インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-PILOTDRILL32-SH9	BCDI13153
		SG-PILOTDRILL32-SH11-N	BCDI13464 ※
		SG-PILOTDRILL32-SH13-N	BCDI13465 ※
φ3.4		SG-PILOTDRILL34-SH9	BCDI13156
		SG-PILOTDRILL34-SH11-N	BCDI13467 ※
		SG-PILOTDRILL34-SH13-N	BCDI13468 ※
φ3.7		SG-PILOTDRILL37-SH9	BCDI13159
		SG-PILOTDRILL37-SH11-N	BCDI13470 ※
		SG-PILOTDRILL37-SH13-N	BCDI13471 ※
φ4.2		SG-PILOTDRILL42-SH9	BCDI13162
		SG-PILOTDRILL42-SH11-N	BCDI13473 ※
		SG-PILOTDRILL42-SH13-N	BCDI13474 ※
φ4.7		SG-PILOTDRILL47-SH9	BCDI13165
		SG-PILOTDRILL47-SH11-N	BCDI13476 ※
		SG-PILOTDRILL47-SH13-N	BCDI13477 ※
φ5.2		SG-PILOTDRILL52-SH9	BCDI13168
		SG-PILOTDRILL52-SH11-N	BCDI13479 ※
		SG-PILOTDRILL52-SH13-N	BCDI13480 ※

※受注生産品

SGステップドリル








インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ4.2		SG-STEPDRL42-SH9-N	BCDI13490
		SG-STEPDRL42-SH11-N	BCDI13491 ※
		SG-STEPDRL42-SH13-N	BCDI13492 ※
φ4.7		SG-STEPDRL47-SH9-N	BCDI13493
		SG-STEPDRL47-SH11-N	BCDI13494 ※
		SG-STEPDRL47-SH13-N	BCDI13495 ※
φ5.2 (#1)		SG-STEPDRL52-SH9#1N	BCDI13496
		SG-STEPDRL52-SH11#1N	BCDI13497 ※
		SG-STEPDRL52-SH13#1N	BCDI13498 ※
φ5.2 (#2)		SG-STEPDRL52-SH9#2N	BCDI13499
		SG-STEPDRL52-SH11#2N	BCDI13500 ※
		SG-STEPDRL52-SH13#2N	BCDI13501 ※













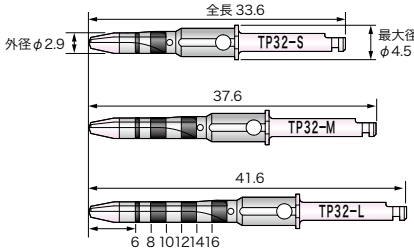
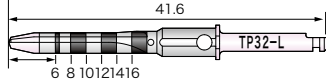
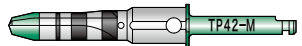
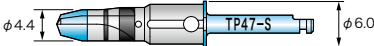
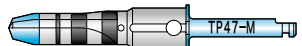
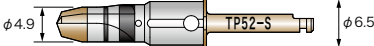
※受注生産品

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2	 全長 33.6 外径 φ2.9 最大径 φ4.5 TP32-S	SG-FINALDRL32-TP-S	BCDI13203
	 37.6 TP32-M	SG-FINALDRL32-TP-M	BCDI13204
	 41.6 TP32-L 6 8 10 12 14 16	SG-FINALDRL32-TP-L	BCDI13205
φ3.4	 φ3.1 TP34-S φ4.7	SG-FINALDRL34-TP-S	BCDI13206
	 TP34-M	SG-FINALDRL34-TP-M	BCDI13207
	 TP34-L	SG-FINALDRL34-TP-L	BCDI13208
φ3.7	 φ3.4 TP37-S φ5.0	SG-FINALDRL37-TP-S	BCDI13209
	 TP37-M	SG-FINALDRL37-TP-M	BCDI13210
	 TP37-L	SG-FINALDRL37-TP-L	BCDI13211
φ4.2	 φ3.9 TP42-S φ5.5	SG-FINALDRL42-TP-S	BCDI13212
	 TP42-M	SG-FINALDRL42-TP-M	BCDI13213
	 TP42-L	SG-FINALDRL42-TP-L	BCDI13214
φ4.7	 φ4.4 TP47-S φ6.0	SG-FINALDRL47-TP-S	BCDI13215
	 TP47-M	SG-FINALDRL47-TP-M	BCDI13216
	 TP47-L	SG-FINALDRL47-TP-L	BCDI13217
φ5.2	 φ4.9 TP52-S φ6.5	SG-FINALDRL52-TP-S	BCDI13218
	 TP52-M	SG-FINALDRL52-TP-M	BCDI13219
	 TP52-L	SG-FINALDRL52-TP-L	BCDI13220

SGファイナルドリルST


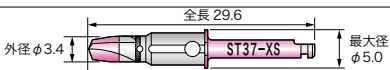
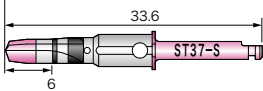
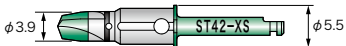
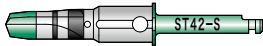
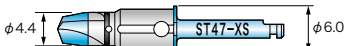
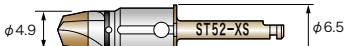
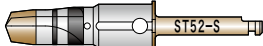
Straight type 

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-FINALDRL37-ST-XS	BCDI13230
		SG-FINALDRL37-ST-S	BCDI13231
φ4.2		SG-FINALDRL42-ST-XS	BCDI13234
		SG-FINALDRL42-ST-S	BCDI13235
φ4.7		SG-FINALDRL47-ST-XS	BCDI13238
		SG-FINALDRL47-ST-S	BCDI13239
φ5.2		SG-FINALDRL52-ST-XS	BCDI13242
		SG-FINALDRL52-ST-S	BCDI13243

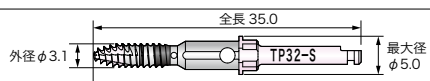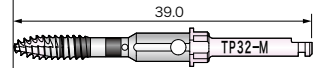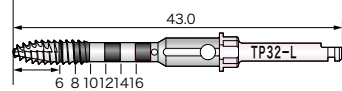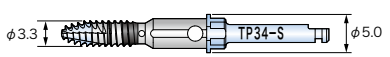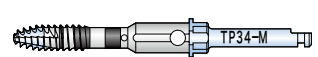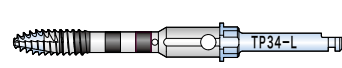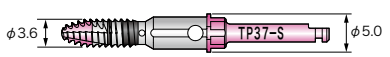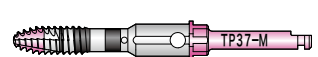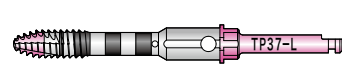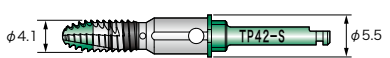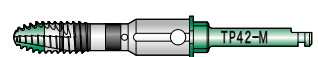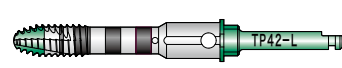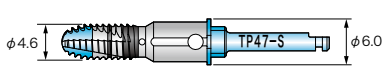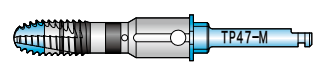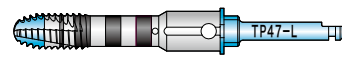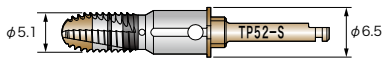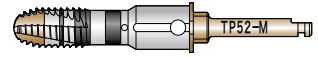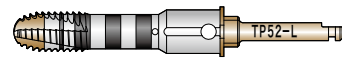インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2	 全長 35.0 外径 φ3.1 最大径 φ5.0 TP32-S	SG-T FORMER32-TP-S	BCDI13253
	 39.0 TP32-M	SG-T FORMER32-TP-M	BCDI13254
	 43.0 6 8 10 12 14 16 TP32-L	SG-T FORMER32-TP-L	BCDI13255
φ3.4	 φ3.3 φ5.0 TP34-S	SG-T FORMER34-TP-S	BCDI13256
	 TP34-M	SG-T FORMER34-TP-M	BCDI13257
	 TP34-L	SG-T FORMER34-TP-L	BCDI13258
φ3.7	 φ3.6 φ5.0 TP37-S	SG-T FORMER37-TP-S	BCDI13259
	 TP37-M	SG-T FORMER37-TP-M	BCDI13260
	 TP37-L	SG-T FORMER37-TP-L	BCDI13261
φ4.2	 φ4.1 φ5.5 TP42-S	SG-T FORMER42-TP-S	BCDI13262
	 TP42-M	SG-T FORMER42-TP-M	BCDI13263
	 TP42-L	SG-T FORMER42-TP-L	BCDI13264
φ4.7	 φ4.6 φ6.0 TP47-S	SG-T FORMER47-TP-S	BCDI13265
	 TP47-M	SG-T FORMER47-TP-M	BCDI13266
	 TP47-L	SG-T FORMER47-TP-L	BCDI13267
φ5.2	 φ5.1 φ6.5 TP52-S	SG-T FORMER52-TP-S	BCDI13268
	 TP52-M	SG-T FORMER52-TP-M	BCDI13269
	 TP52-L	SG-T FORMER52-TP-L	BCDI13270





SGタップフォーマー-ST

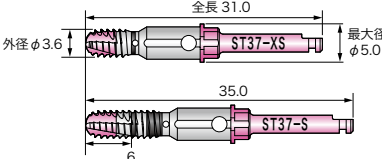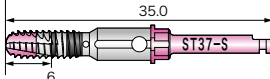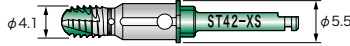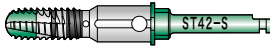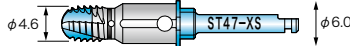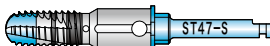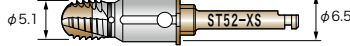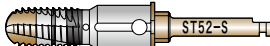Straight type 

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-T FORMER37-ST-XS	BCDI13280
		SG-T FORMER37-ST-S	BCDI13281
φ4.2		SG-T FORMER42-ST-XS	BCDI13284
		SG-T FORMER42-ST-S	BCDI13285
φ4.7		SG-T FORMER47-ST-XS	BCDI13288
		SG-T FORMER47-ST-S	BCDI13289
φ5.2		SG-T FORMER52-ST-XS	BCDI13292
		SG-T FORMER52-ST-S	BCDI13293


SGガイドアンカーTP

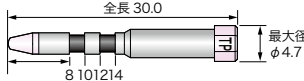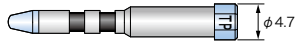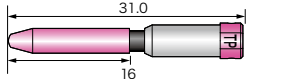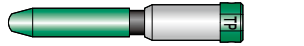Tapered type 

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SG-ANCHOR32-TP-M	BCDI13302
φ3.4		SG-ANCHOR34-TP-M	BCDI13304
φ3.7		SG-ANCHOR37-TP-M	BCDI13306
		SG-ANCHOR37-TP-L(N)	BCDI11573
φ4.2		SG-ANCHOR42-TP-M	BCDI13308
		SG-ANCHOR42-TP-L(N)	BCDI11574
φ4.7		SG-ANCHOR47-TP-M	BCDI13310
		SG-ANCHOR47-TP-L(N)	BCDI11575
φ5.2		SG-ANCHOR52-TP-M	BCDI13312
		SG-ANCHOR52-TP-L(N)	BCDI11576

SGガイドアンカーST

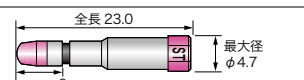Straight type 

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-ANCHOR37-ST-S	BCDI13320
φ4.2		SG-ANCHOR42-ST-S	BCDI13323
φ4.7		SG-ANCHOR47-ST-S	BCDI13326
φ5.2		SG-ANCHOR52-ST-S	BCDI13329


SG プロファイルドリル

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		SG-PROFILE DRL37RP	BCDI13510
φ4.2		SG-PROFILE DRL42RP	BCDI13511
φ4.7		SG-PROFILE DRL47RP	BCDI13512
		SG-PROFILE DRL47WP	BCDI13513

プロファイルドリル FINESIA TLインプラントのカラー部の形状に合わせてインプラント床を形成するために使用します。

(TL専用)

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.7		PROFILE DRL37RP-S(N)	BCDI11610
φ4.2		PROFILE DRL42RP-S(N)	BCDI11611
φ4.7		PROFILE DRL47RP-S(N)	BCDI11612
		PROFILE DRL47WP-S(N)	BCDI11613







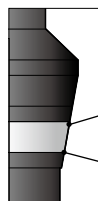


GH1.5mm用
ライン
GH2.5mm用
ライン

製品リスト

SG BLインプラントドライバー

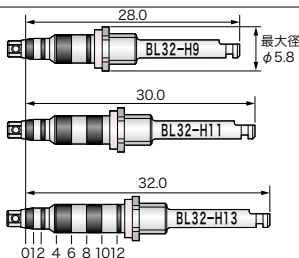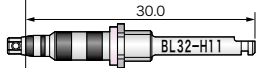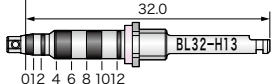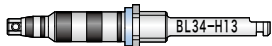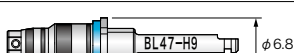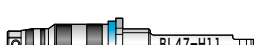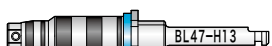(BL専用)

インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-SH9	BCDI13340
		SGBL-I DRIVER32-SH11	BCDI13341 ※
		SGBL-I DRIVER32-SH13	BCDI13342 ※
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-SH9	BCDI13343
		SGBL-I DRIVER34-SH11	BCDI13344 ※
		SGBL-I DRIVER34-SH13	BCDI13345 ※
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-SH9	BCDI13346
		SGBL-I DRIVER37-SH11	BCDI13347 ※
		SGBL-I DRIVER37-SH13	BCDI13348 ※
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-SH9	BCDI13349
		SGBL-I DRIVER42-SH11	BCDI13350 ※
		SGBL-I DRIVER42-SH13	BCDI13351 ※
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-SH9	BCDI13352
		SGBL-I DRIVER47-SH11	BCDI13353 ※
		SGBL-I DRIVER47-SH13	BCDI13354 ※
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-SH9	BCDI13355
		SGBL-I DRIVER52-SH11	BCDI13356 ※
		SGBL-I DRIVER52-SH13	BCDI13357 ※

※受注生産品

SG BLインプラントドライバーWH

(BL専用)



インプラント径 (単位:mm)	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
φ3.2		SGBL-I DRIVER32-WH9	BCDI13411
		SGBL-I DRIVER32-WH11	BCDI13412
		SGBL-I DRIVER32-WH13	BCDI13413
φ3.4		SGBL-I DRIVER34-WH9	BCDI13414
		SGBL-I DRIVER34-WH11	BCDI13415
		SGBL-I DRIVER34-WH13	BCDI13416
φ3.7		SGBL-I DRIVER37-WH9	BCDI13417
		SGBL-I DRIVER37-WH11	BCDI13418
		SGBL-I DRIVER37-WH13	BCDI13419
φ4.2		SGBL-I DRIVER42-WH9	BCDI13420
		SGBL-I DRIVER42-WH11	BCDI13421
		SGBL-I DRIVER42-WH13	BCDI13422
φ4.7		SGBL-I DRIVER47-WH9	BCDI13423
		SGBL-I DRIVER47-WH11	BCDI13424
		SGBL-I DRIVER47-WH13	BCDI13425
φ5.2		SGBL-I DRIVER52-WH9	BCDI13426
		SGBL-I DRIVER52-WH11	BCDI13427
		SGBL-I DRIVER52-WH13	BCDI13428

製品リスト

TLインプラントドライバーCH


TLインプラントをキャリングならびに埋入するために使用します。

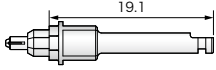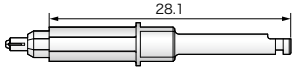(TL専用)

	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
S		FTL-I DRIVER-S-CH	BCDI11410
L		FTL-I DRIVER-L-CH	BCDI11411


トルクレンチ

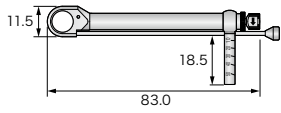FDアダプタ、DAアダプタまたはCHアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。インプラント体埋入時のトルクが確認できます。

	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
		TORQUEWRENCH	BCDI11286

FD アダプタ

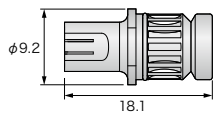ヘキサロビューラドライバーWH、インプラントドライバーを装着し、トルクレンチで使用します。

	寸法・形状 (単位:mm)	商品名	商品コード
		FD ADAPTER	BCDI11289

ケース関連

	商品名	商品コード
	TITANIUM TRAY	BCDI13400
	F-SG-SURGICAL CASE-L	BCDI13391

TITANIUM TRAY



F-SG-SURGICAL CASE-L



本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30400BZX00158000	Ⅲ
FINESIA TLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30500BZX00286000	Ⅲ
FINESIAサージカルガイドシステム器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101123	Ⅰ
FINESIAインプラント用手術器具	一般医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101122	Ⅰ
FINESIA技工用器具	一般医療機器	歯科用インプラント技工用器材	26B1X10012102114	Ⅰ
歯科用トルクレンチ	一般医療機器	手術用レンチ	26B1X10012108103	Ⅰ
インプランター Neo ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	22200BZX00173000	Ⅱ
インプランター Neo BRIGHT ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	22200BZX00201000	Ⅱ
インプランター Neo Black ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	222ALBZX00003000	Ⅱ
インプランター Neo Plus ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	223ALBZX00027A01	Ⅱ
インプランター Neo Plus2	管理医療機器	電動式骨手術器械	303ALBZX00014A01	Ⅱ

製造販売元：京セラメディカル株式会社

上記インプランター 5 種類の製造販売元は株式会社ナカニシです。

※販売終了製品です。

京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」「Relios」「インプランター」は、
京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。