


FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

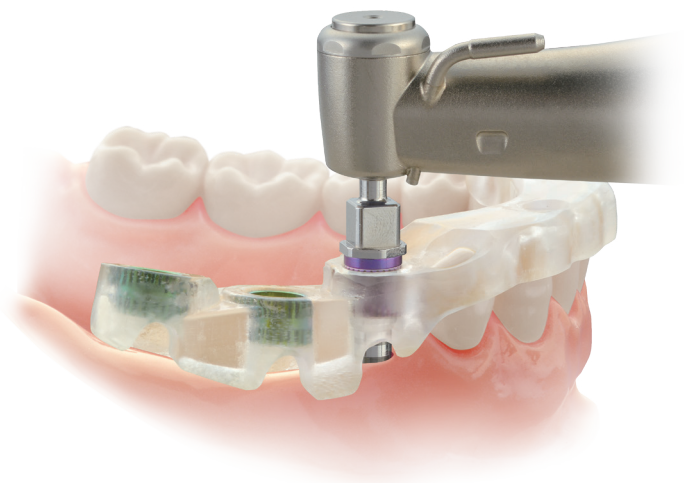

Bone Level


FINESIA® Surgical Guide System

Relios

Straight type

術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径 ϕ 4.2mm、骨内長6mm、Straight typeの場合

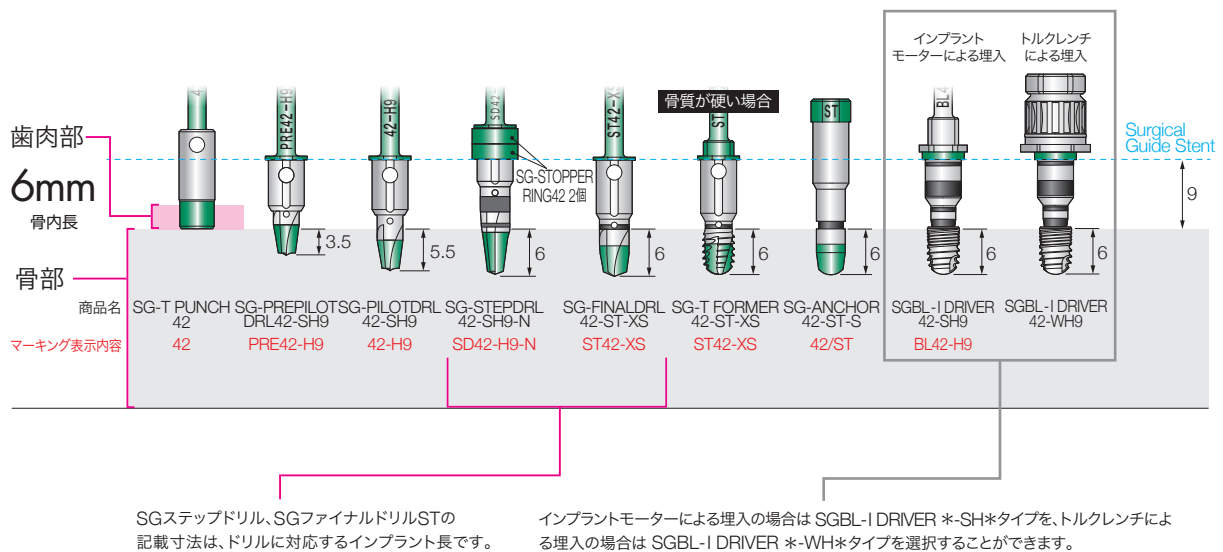

ドリル先端仕様



SGステップドリル、SGファイナルドリルSTのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル

SGファイナルドリルST

ϕ 4.2mm ϕ 4.7mm ϕ 5.2mm → 0.2mm長い

ϕ 3.7mm ϕ 4.2mm ϕ 4.7mm ϕ 5.2mm → 0.2mm長い

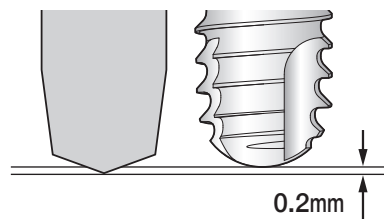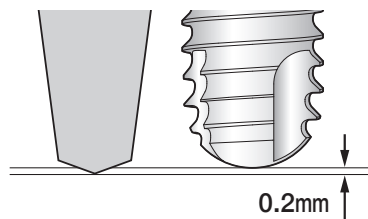

サージカルガイドシステム高さ **9mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System


Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径
φ3.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

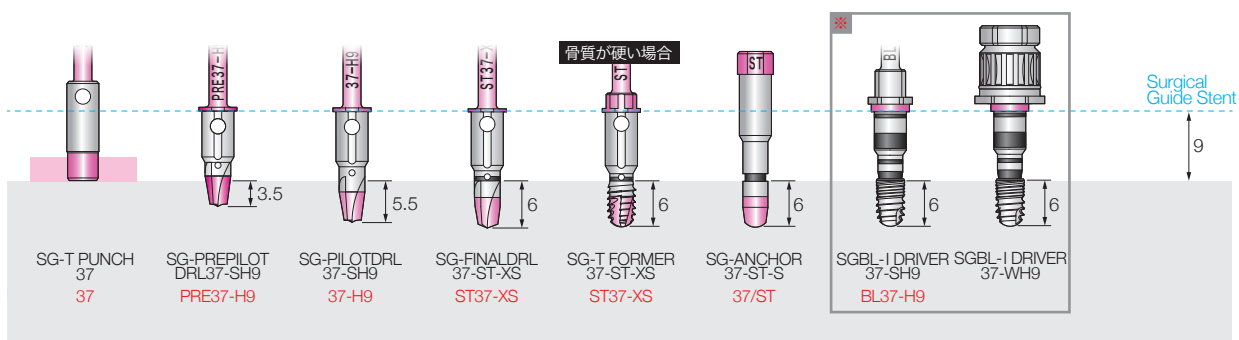


単位: mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

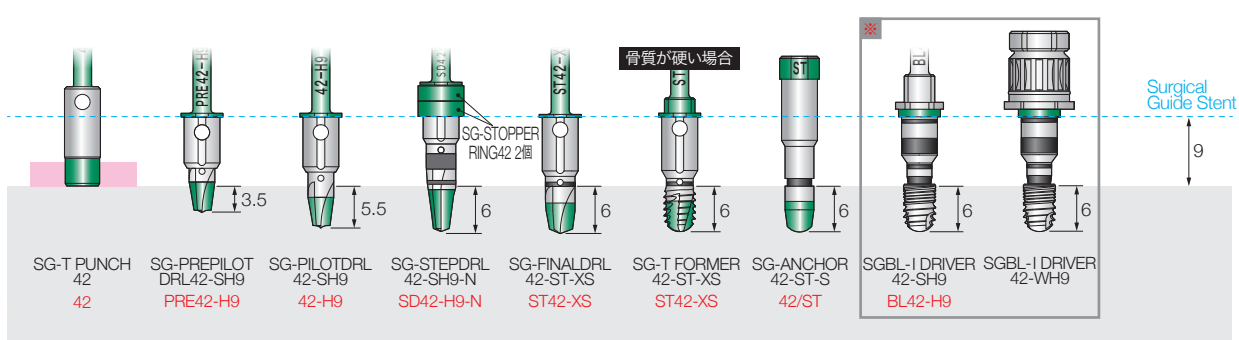


単位: mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

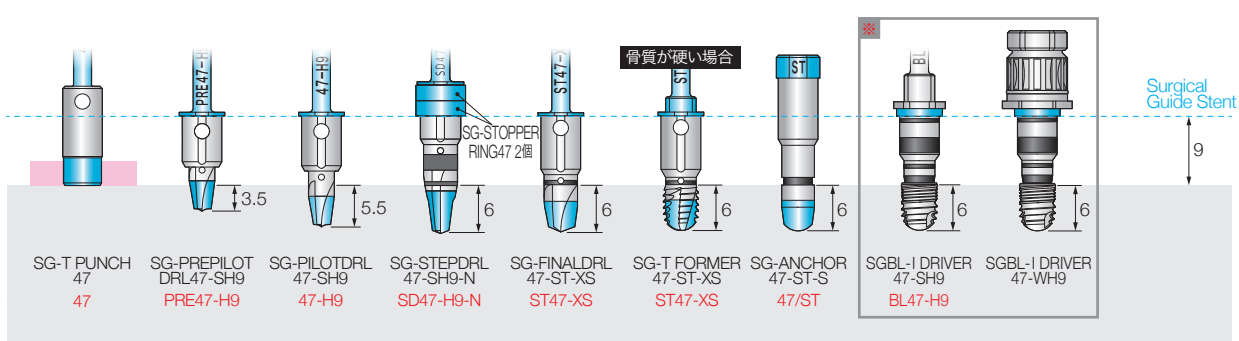


単位: mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ5.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

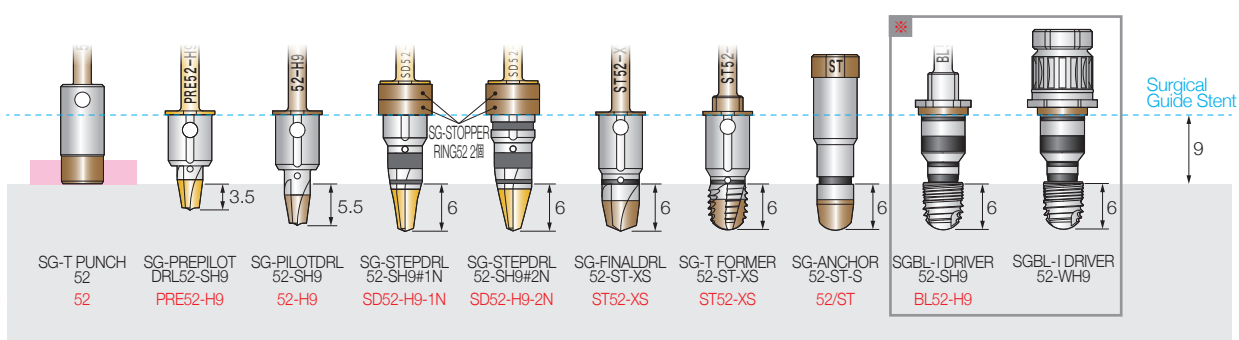

単位: mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9 タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System


Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径
φ3.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

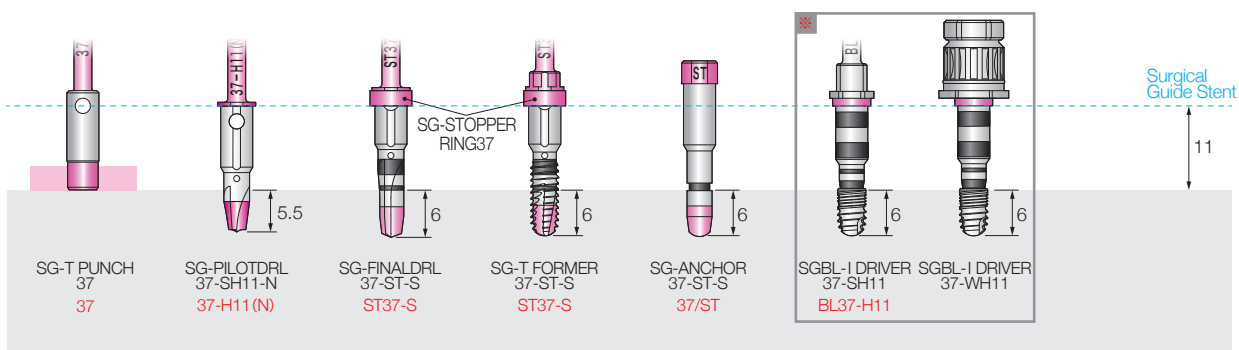


単位: mm

*インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

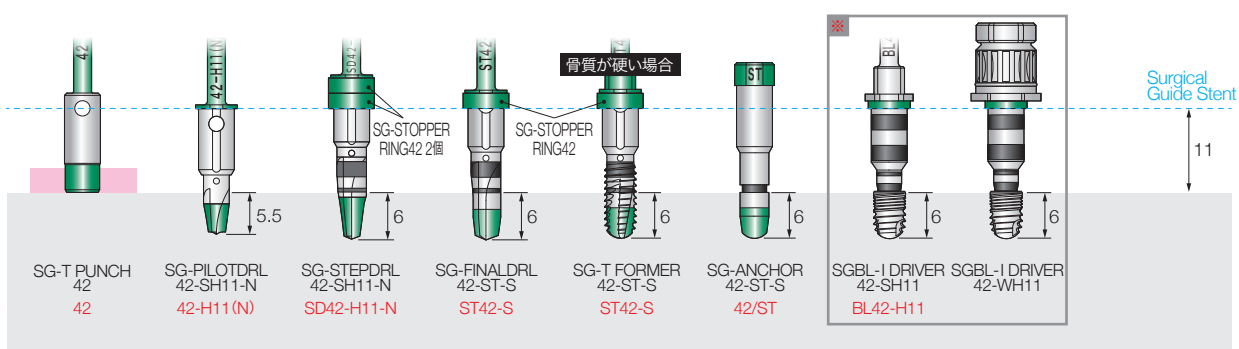


単位: mm

*インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

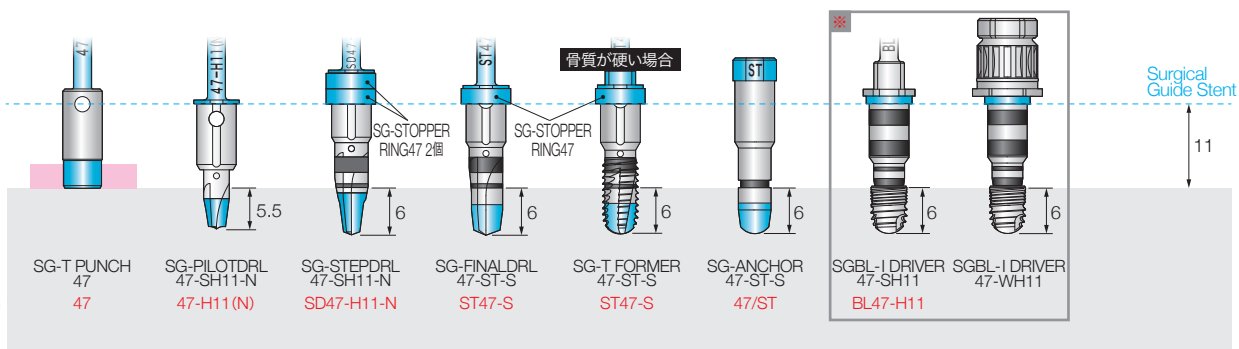


単位: mm

*インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11 タイプを選択することができます。

インプラント径
φ5.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

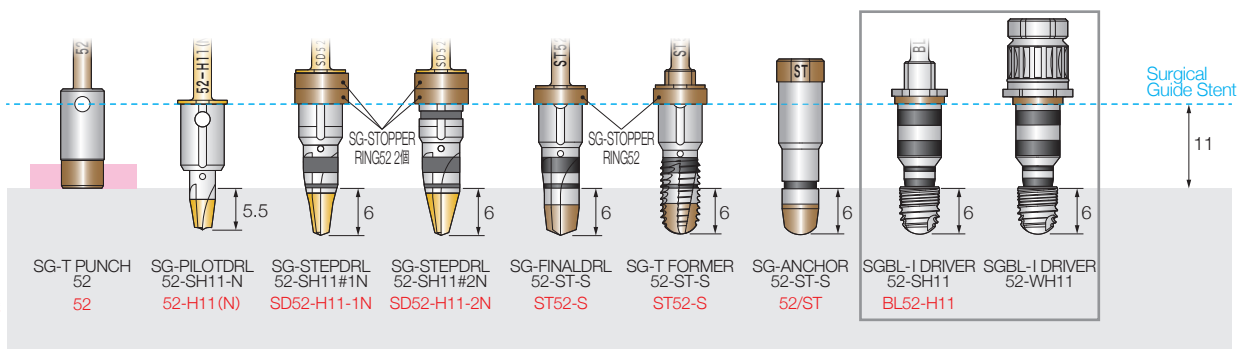

単位: mm

*インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11 タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System


Operative Procedure Chart

Straight type  術式チャート

インプラント径
φ3.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

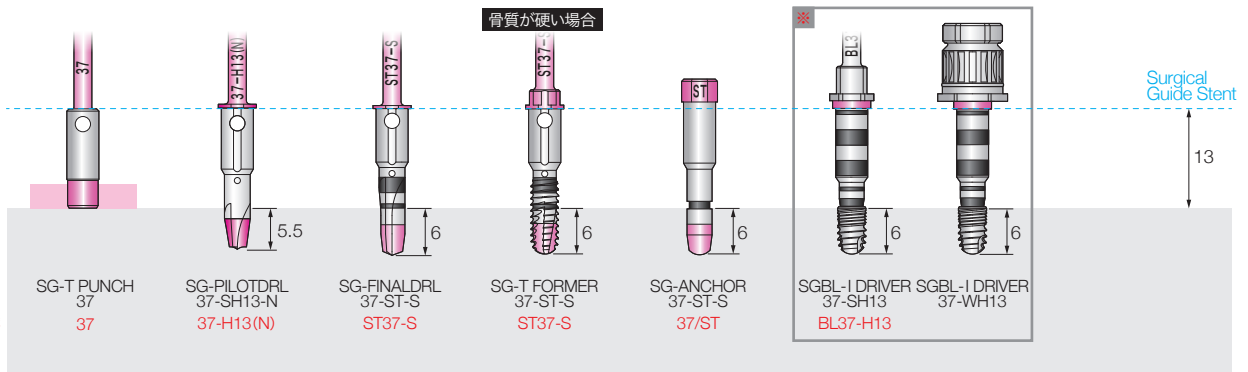


単位 :mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

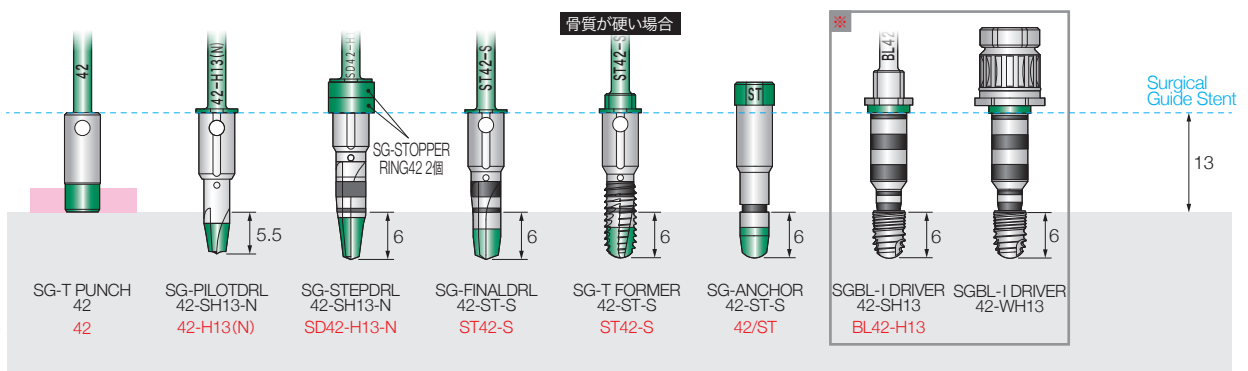


単位 :mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

インプラント径
φ4.7mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

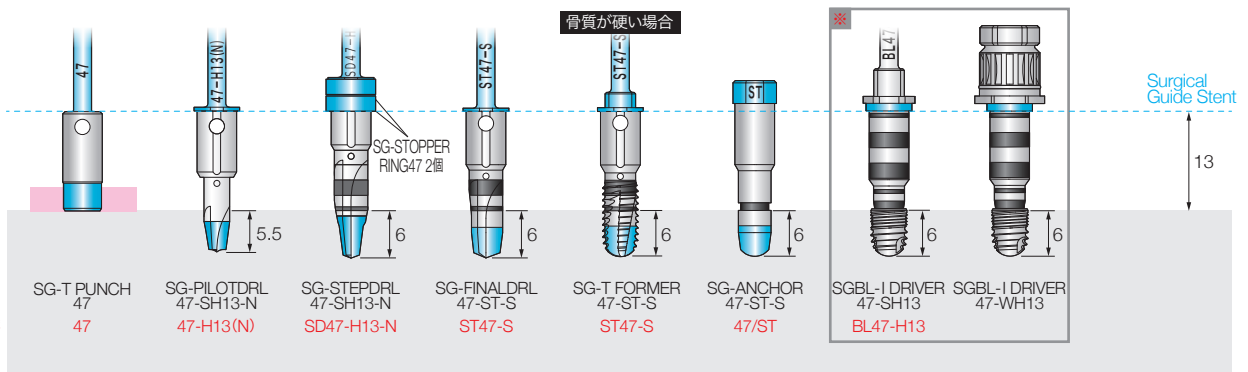


単位 :mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

インプラント径
φ5.2mm

6mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

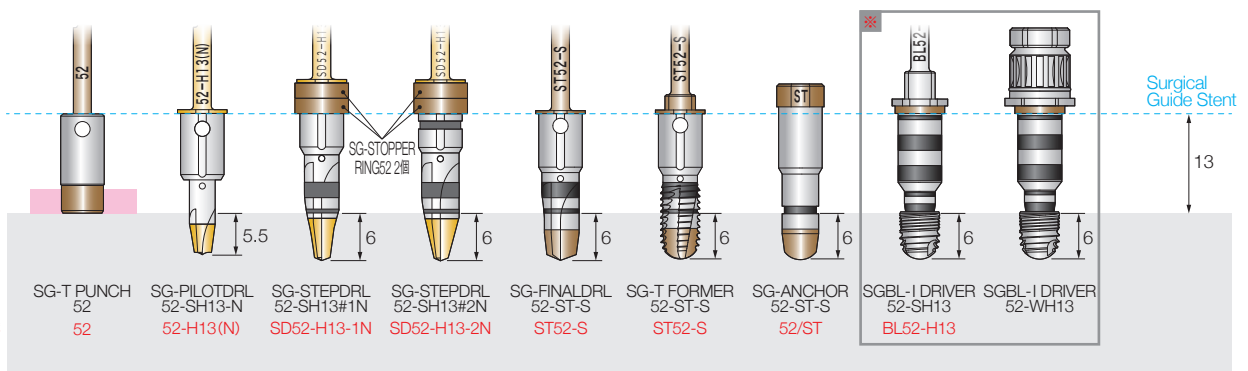

単位 :mm

※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30400BZX00158000	Ⅲ
FINESIA サージカルガイドシステム器具	高度管理医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101123	Ⅰ
歯科用トルクレンチ	一般医療機器	手術用レンチ	26B1X10012108103	Ⅰ
インプランター Neo Plus ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	223ALBZX00027A01	Ⅱ
インプランター Neo Plus2	管理医療機器	電動式骨手術器械	303ALBZX00014A01	Ⅱ

製造販売元：京セラメディカル株式会社

上記インプランター 2種類の製造販売元は株式会社ナカニシです。
※販売終了製品です。

京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東京営業所 東京都港区三田三丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-8316
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.fnesia.world

「FINESIA」「Relios」は、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当術式チャートに記載の情報は、2025年10月時点のものです。
当術式チャートについては、無断で複製、転載することを禁じます。