

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type  術式チャート



Bone Level

FINESIA® Surgical Guide System

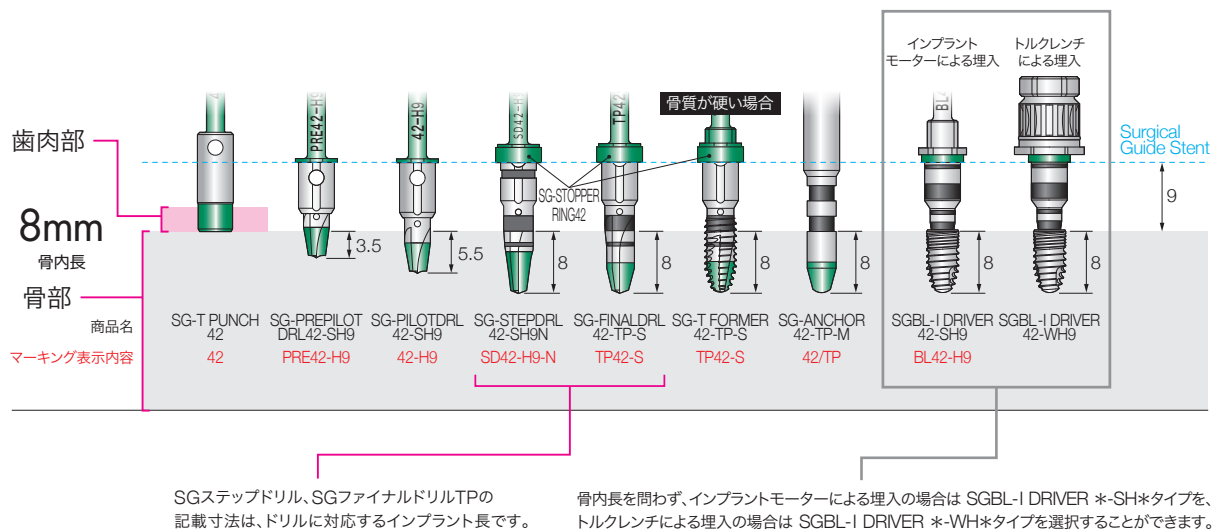
Relios

Tapered type



術式チャートの見方

(例) サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長8mm、Tapered typeの場合




ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル

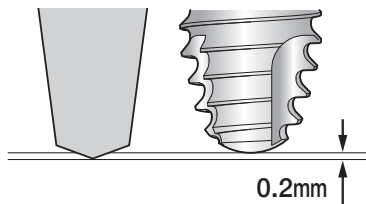
φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い



SGファイナルドリルTP

φ3.2mm φ3.4mm φ3.7mm → 0.1mm長い

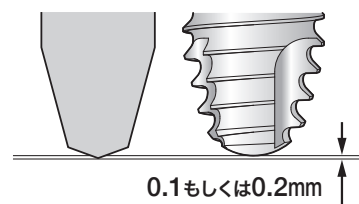φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm → 0.2mm長い



サージカルガイドシステム高さ 9mm

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

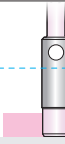
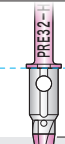
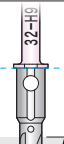
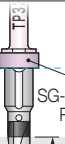
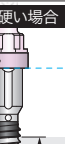
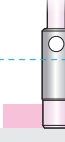
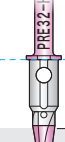
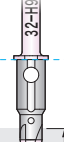
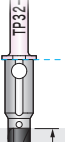
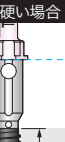
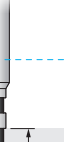
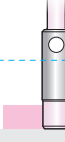
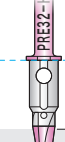
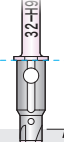
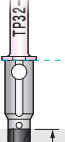
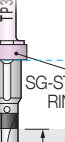
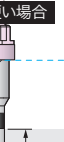
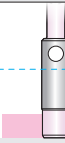
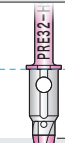
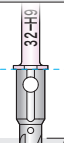
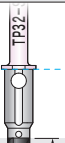
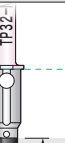
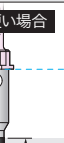
Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート



























インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$

8mm 骨内長									Surgical Guide Stent 9
商品名 マーキング表示内容	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M 32/TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	SGBL-I DRIVER 32-WH9	
10mm 骨内長									Surgical Guide Stent
商品名 マーキング表示内容	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M 32/TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	SGBL-I DRIVER 32-WH9	
12mm 骨内長									Surgical Guide Stent
商品名 マーキング表示内容	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M 32/TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	SGBL-I DRIVER 32-WH9	
14mm 骨内長									Surgical Guide Stent
商品名 マーキング表示内容	SG-T PUNCH 32	SG-PREPILOT DRL32-SH9 PRE32-H9	SG-PILOTDRILL 32-SH9 32-H9	SG-FINALDRILL 32-TP-S TP32-S	SG-T FORMER 32-TP-S TP32-S	SG-ANCHOR 32-TP-M 32/TP	SGBL-I DRIVER 32-SH9 BL32-H9	SGBL-I DRIVER 32-WH9	

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。








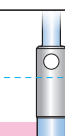
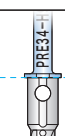
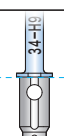
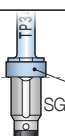
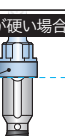
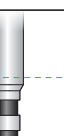
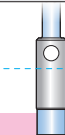
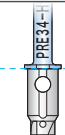
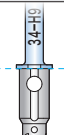
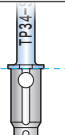
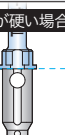
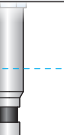
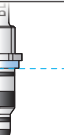
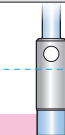
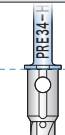
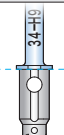
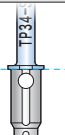
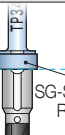
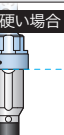
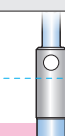
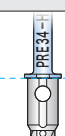
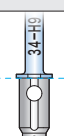
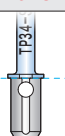
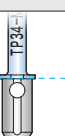
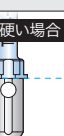
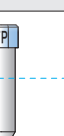
インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

8mm 骨内長	商品名 マーキング表示内容	 SG-T PUNCH 34	 SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	 SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	 SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	 SG-T FORMER 34-TP-S TP34-S	 SG-ANCHOR 34-TP-M 34/TP	 SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9	 SGBL-I DRIVER 34-WH9	Surgical Guide Stent 9
10mm 骨内長	商品名 マーキング表示内容	 SG-T PUNCH 34	 SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	 SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	 SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	 SG-T FORMER 34-TP-S TP34-S	 SG-ANCHOR 34-TP-M 34/TP	 SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9	 SGBL-I DRIVER 34-WH9	Surgical Guide Stent
12mm 骨内長	商品名 マーキング表示内容	 SG-T PUNCH 34	 SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	 SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	 SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	 SG-T FORMER 34-TP-M TP34-M	 SG-ANCHOR 34-TP-M 34/TP	 SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9	 SGBL-I DRIVER 34-WH9	Surgical Guide Stent
14mm 骨内長	商品名 マーキング表示内容	 SG-T PUNCH 34	 SG-PREPILOT DRL34-SH9 PRE34-H9	 SG-PILOTDRILL 34-SH9 34-H9	 SG-FINALDRILL 34-TP-S TP34-S	 SG-T FORMER 34-TP-M TP34-M	 SG-ANCHOR 34-TP-M 34/TP	 SGBL-I DRIVER 34-SH9 BL34-H9	 SGBL-I DRIVER 34-WH9	Surgical Guide Stent

単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

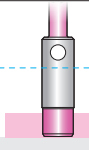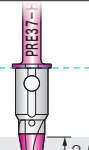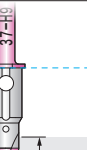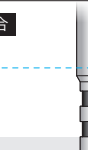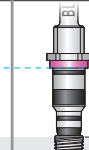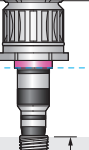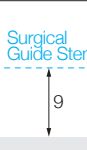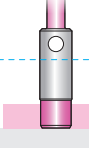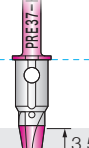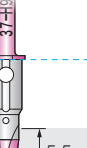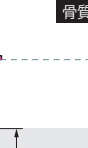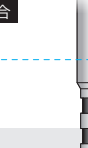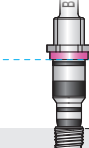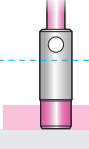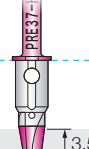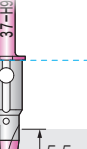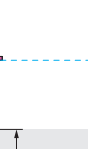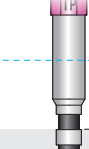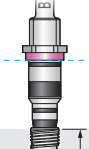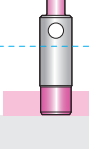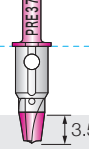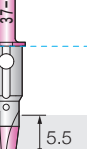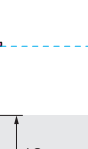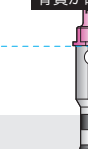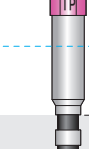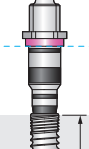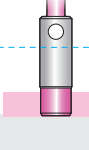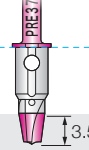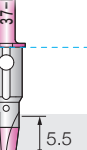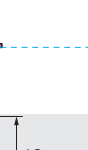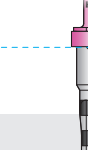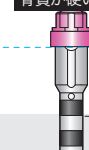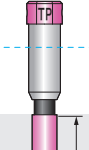
インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$

8mm 骨内長									Surgical Guide Stent 9
10mm 骨内長									Surgical Guide Stent
12mm 骨内長									Surgical Guide Stent
14mm 骨内長									Surgical Guide Stent
16mm 骨内長									Surgical Guide Stent

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。






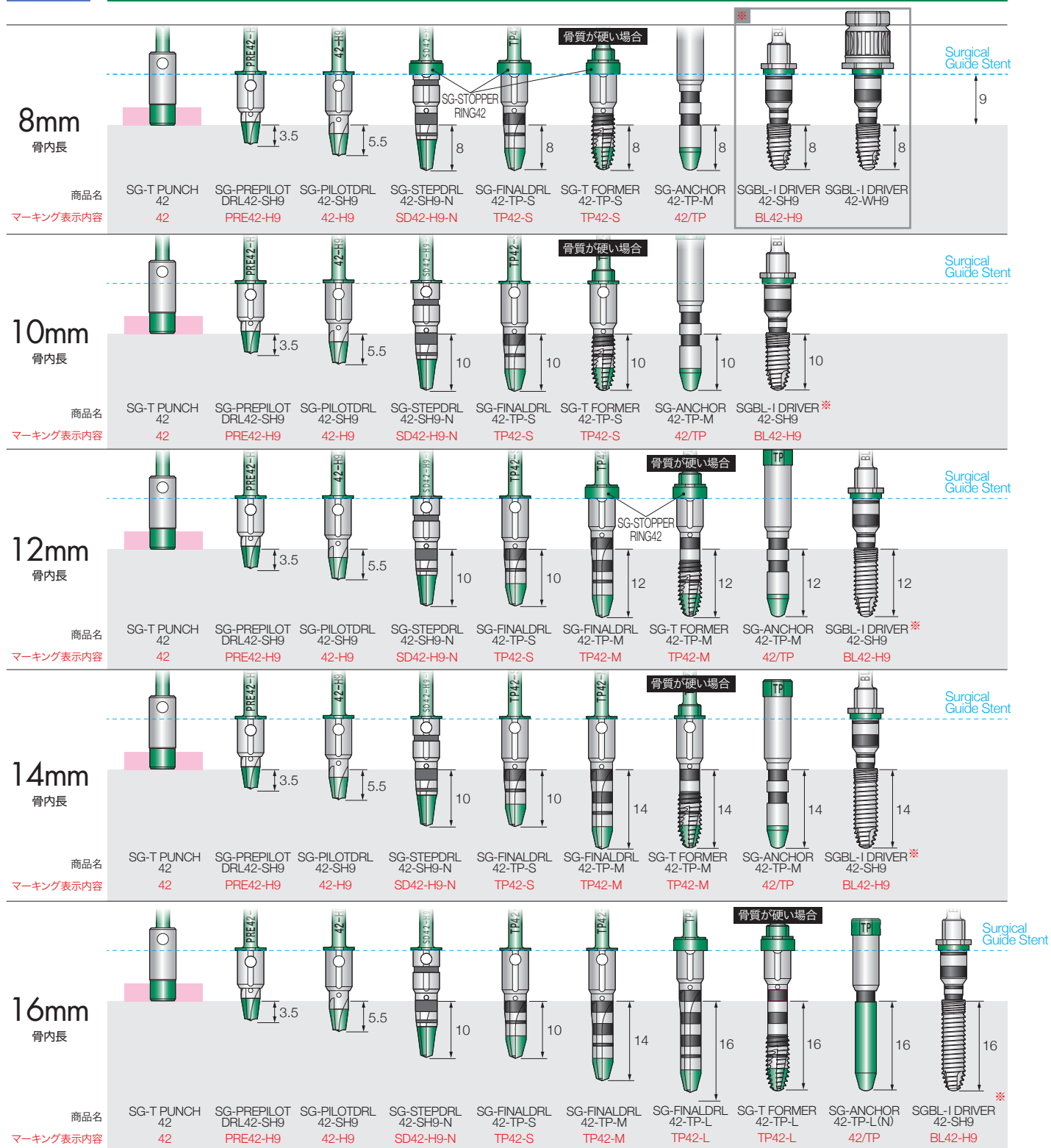
インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

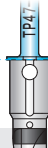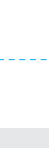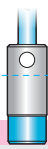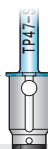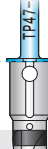
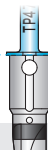
インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$

8mm 骨内長										Surgical Guide Stent 9
10mm 骨内長										Surgical Guide Stent
12mm 骨内長										Surgical Guide Stent
14mm 骨内長										Surgical Guide Stent
16mm 骨内長										Surgical Guide Stent


単位 :mm


※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

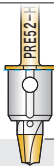
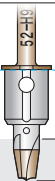
インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$

8mm 骨内長											Surgical Guide Stent 9
商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-T FORMER 52-TP-S	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9	SGBL-I DRIVER 52-WH9	
マーキング表示内容	52	PRE52-H9	52-H9	SD52-H9-1N	SD52-H9-2N	TP52-S	TP52-S	52/TP	BL52-H9		

10mm 骨内長											Surgical Guide Stent
商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-T FORMER 52-TP-S	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9		
マーキング表示内容	52	PRE52-H9	52-H9	SD52-H9-1N	SD52-H9-2N	TP52-S	TP52-S	52/TP	BL52-H9		

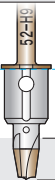12mm 骨内長											Surgical Guide Stent
商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-T FORMER 52-TP-M	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9	
マーキング表示内容	52	PRE52-H9	52-H9	SD52-H9-1N	SD52-H9-2N	TP52-S	TP52-M	TP52-M	52/TP	BL52-H9	

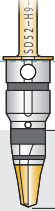14mm 骨内長											Surgical Guide Stent
商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-T FORMER 52-TP-M	SG-ANCHOR 52-TP-M	SGBL-I DRIVER 52-SH9	
マーキング表示内容	52	PRE52-H9	52-H9	SD52-H9-1N	SD52-H9-2N	TP52-S	TP52-M	TP52-M	52/TP	BL52-H9	

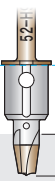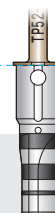16mm 骨内長												Surgical Guide Stent
商品名	SG-T PUNCH 52	SG-PREPILOT DRL52-SH9	SG-PILOTDRILL 52-SH9	SG-STEPDRILL 52-SH9#1N	SG-STEPDRILL 52-SH9#2N	SG-FINALDRILL 52-TP-S	SG-FINALDRILL 52-TP-M	SG-FINALDRILL 52-TP-L	SG-T FORMER 52-TP-L	SG-ANCHOR 52-TP-L(N)	SGBL-I DRIVER 52-SH9	
マーキング表示内容	52	PRE52-H9	52-H9	SD52-H9-1N	SD52-H9-2N	TP52-S	TP52-M	TP52-L	TP52-L	52/TP	BL52-H9	

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **11 mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート

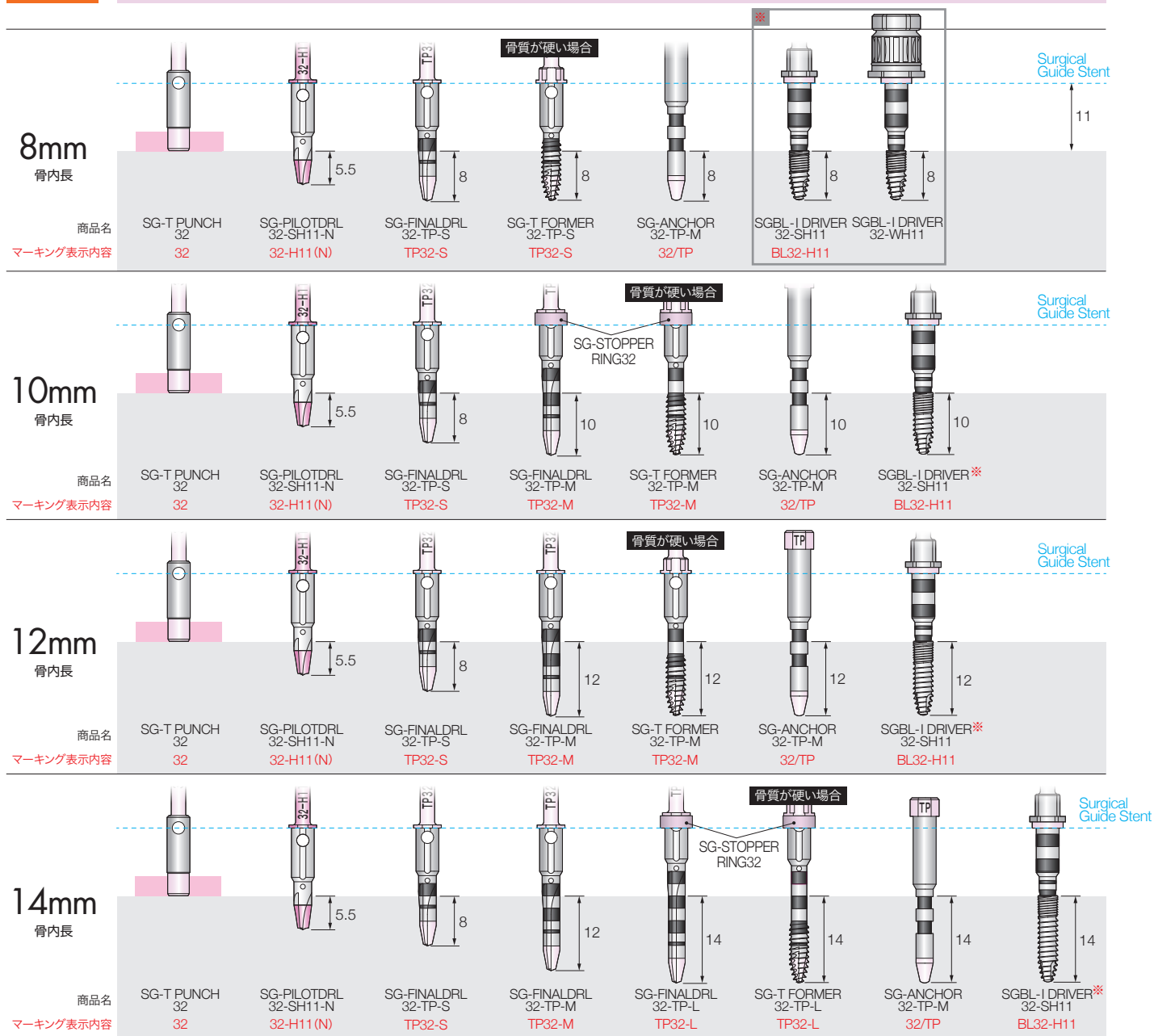
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH11タイプを選択することができます。

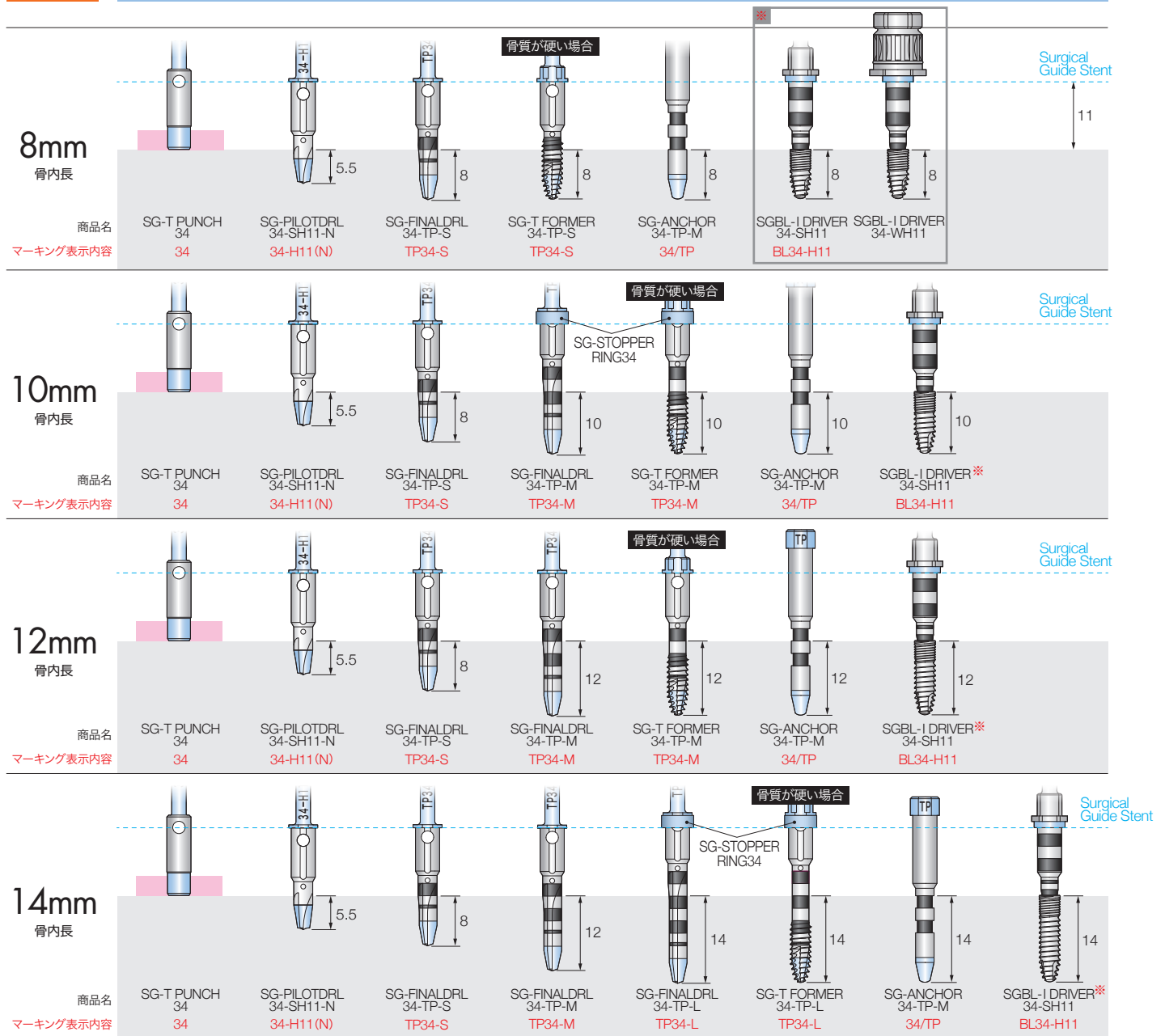
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$



※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH11 タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH11 タイプを選択することができます。

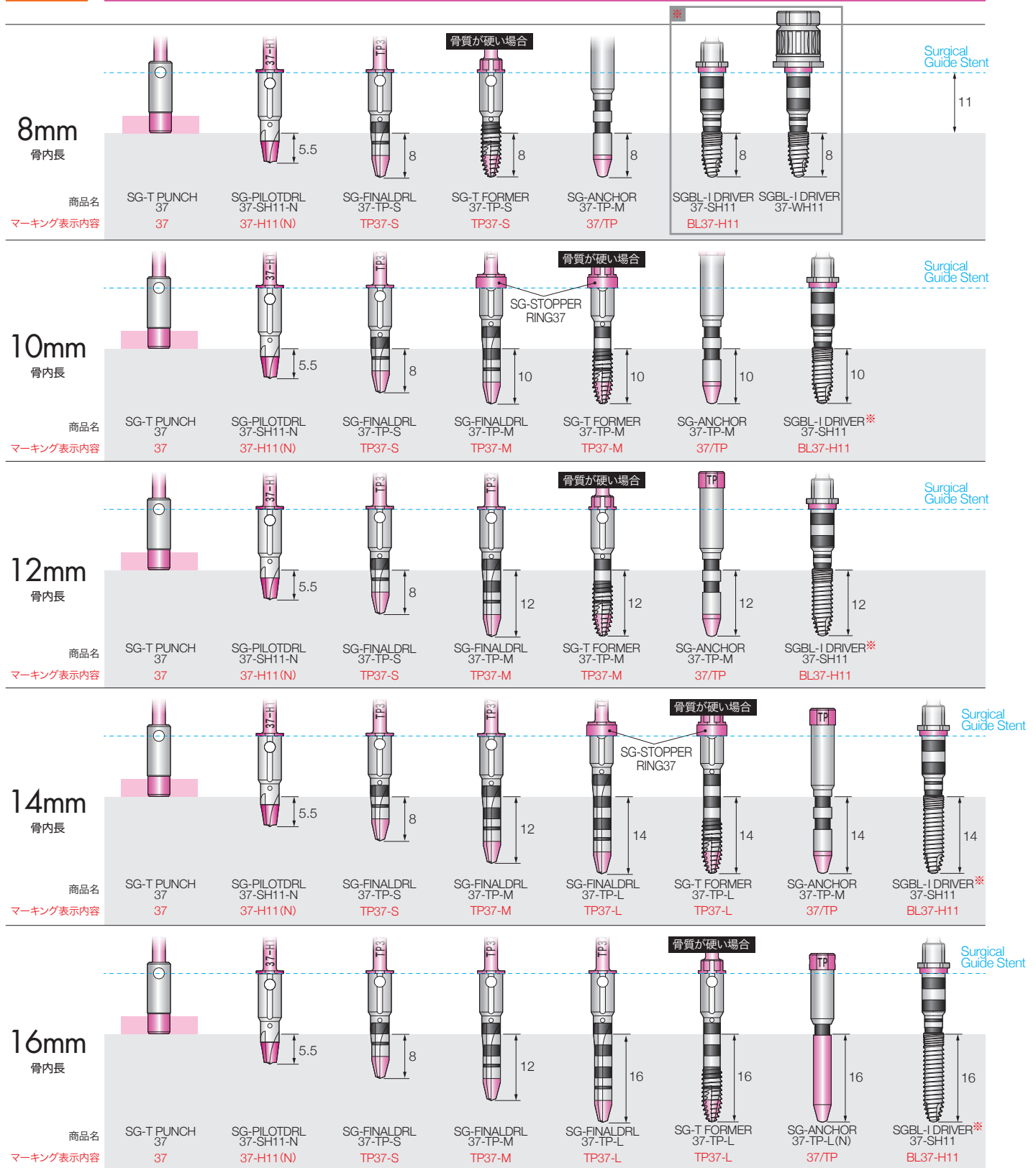
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

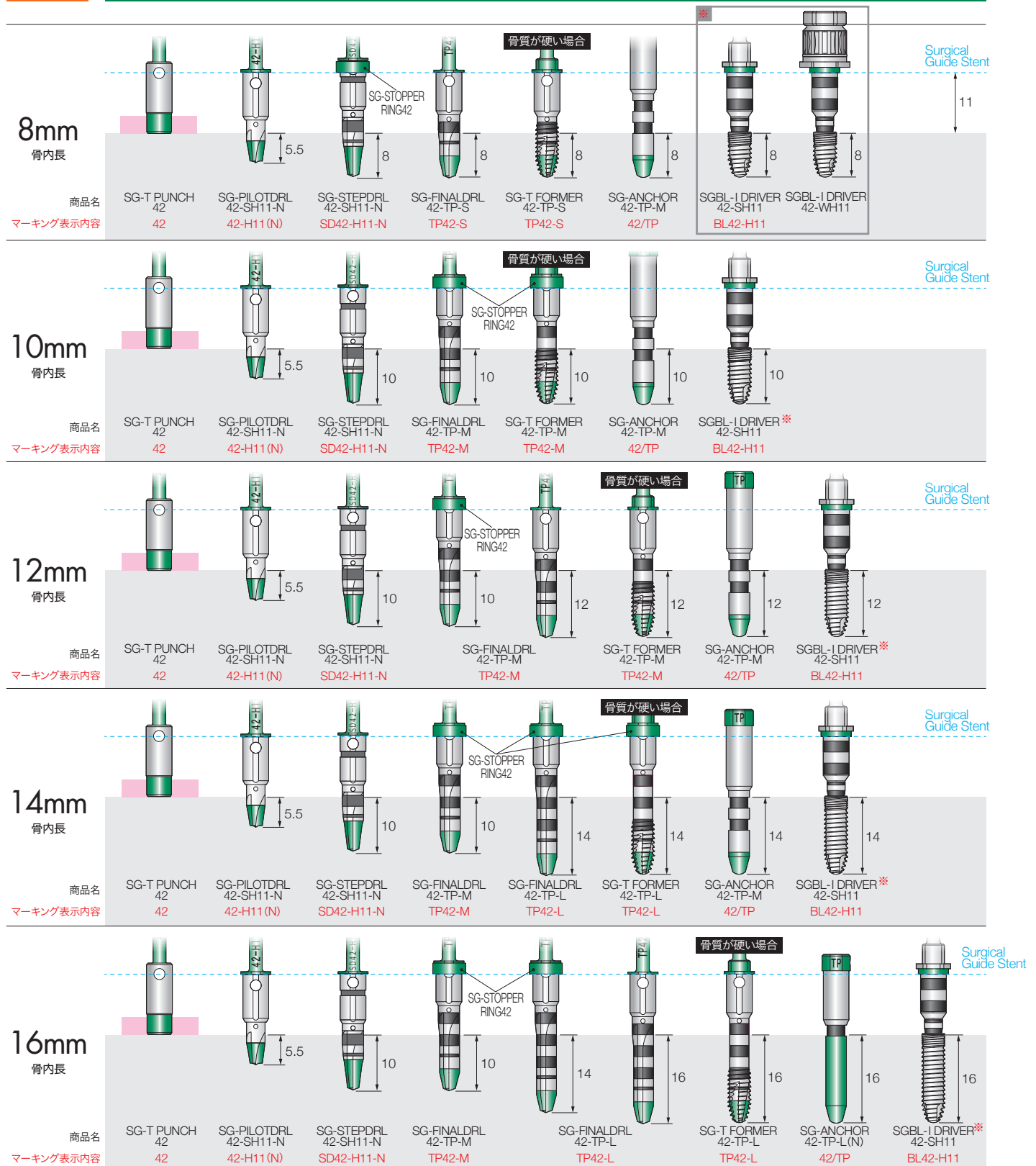
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$



単位 : mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

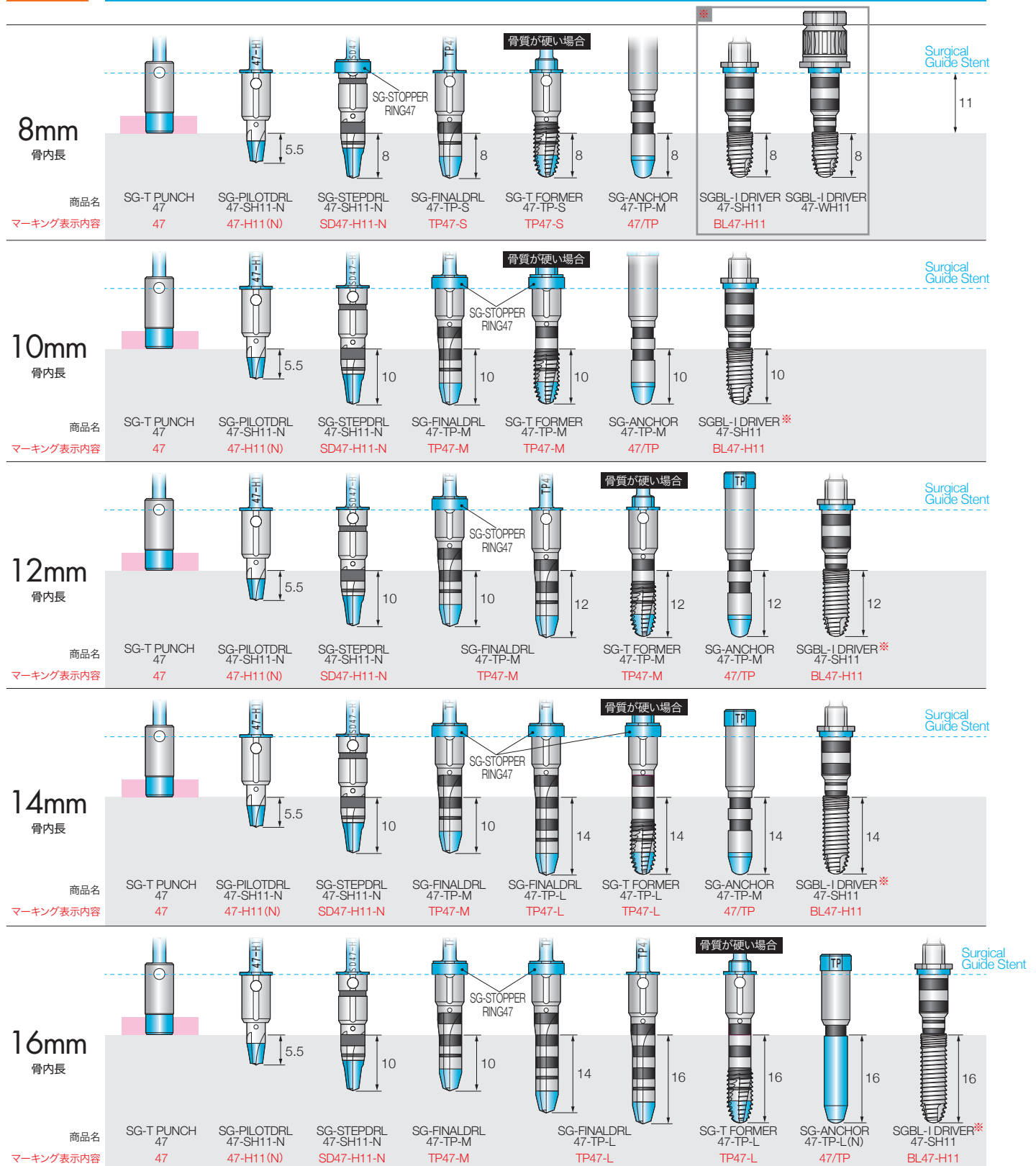
11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドシステム

FINESIA Surgical Guide System

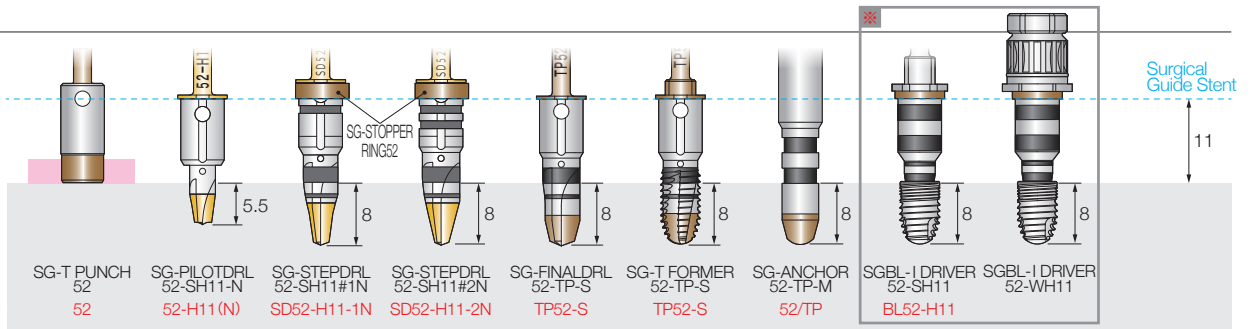
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

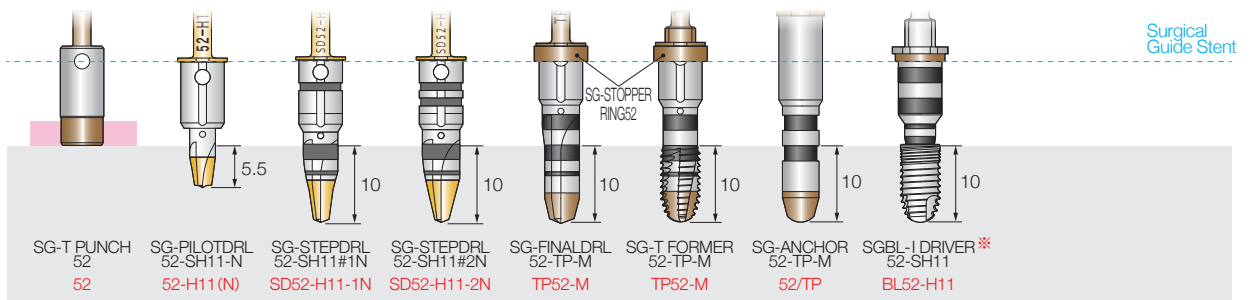商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

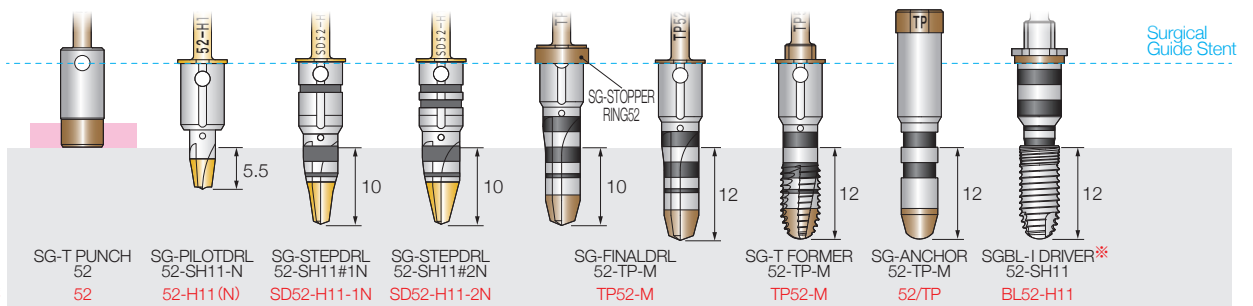商品名
マーキング表示内容




14mm
骨内長

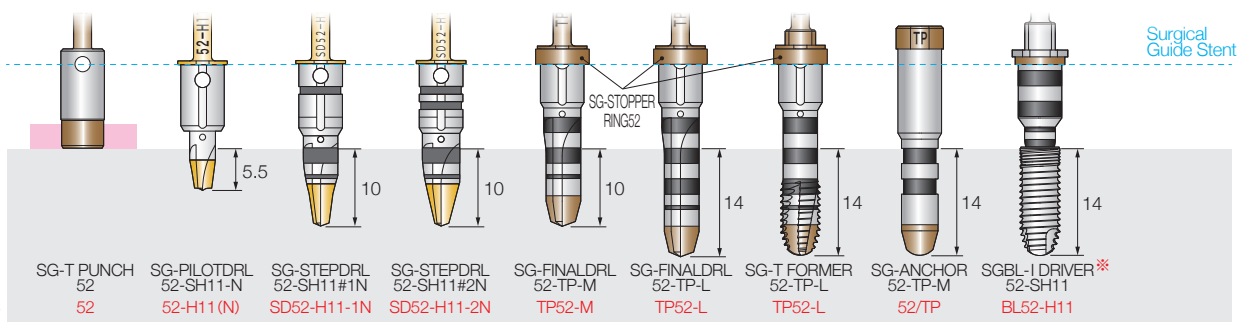商品名
マーキング表示内容



16mm
骨内長

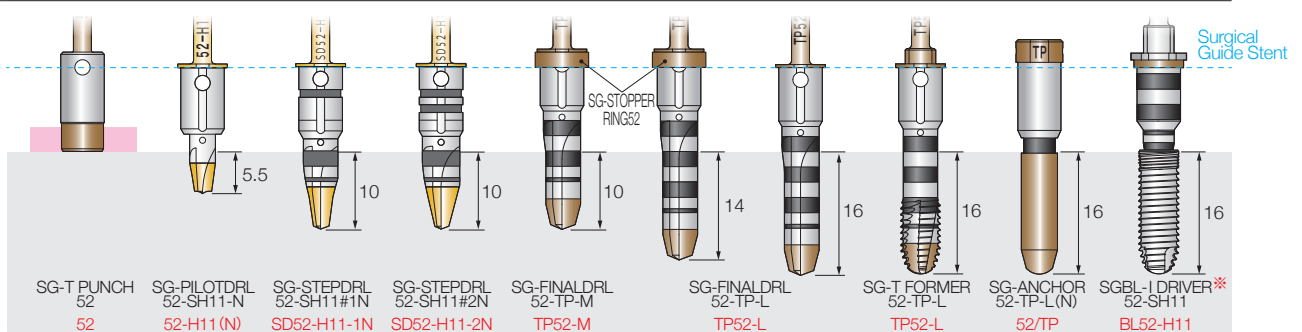商品名
マーキング表示内容



単位: mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ **13mm**

FINESIA®

Relios

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type



術式チャート

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

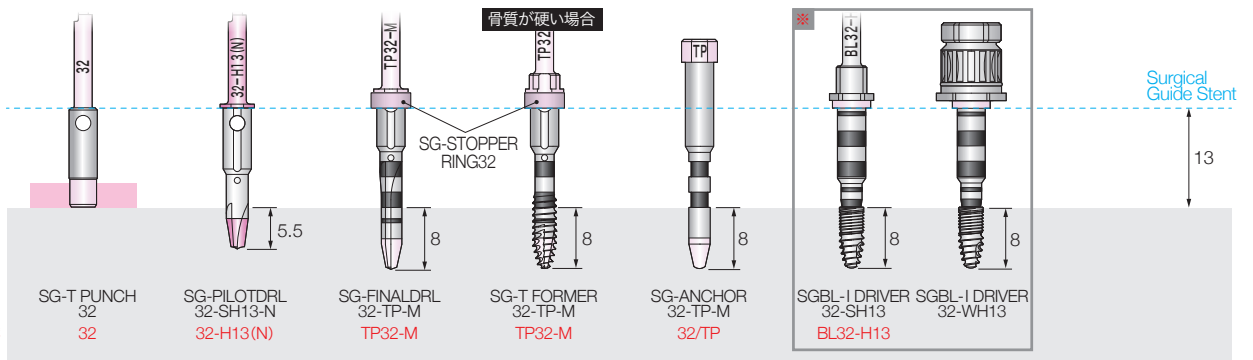
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.2\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

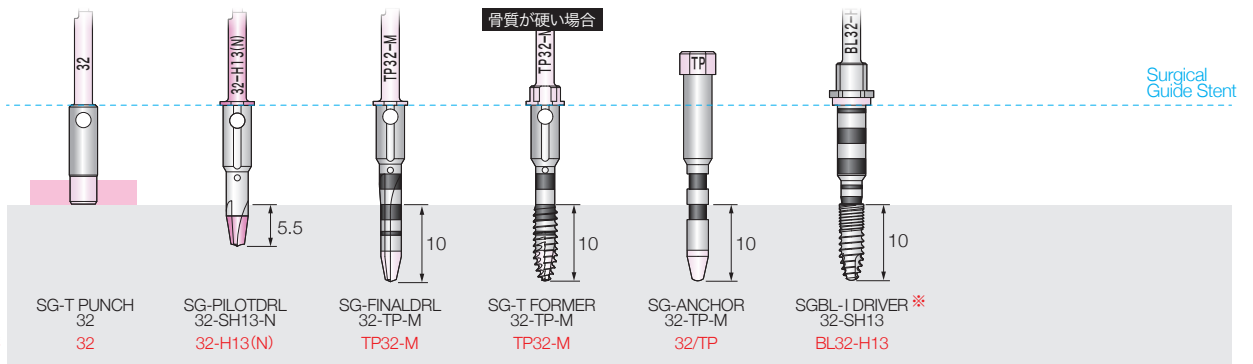商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

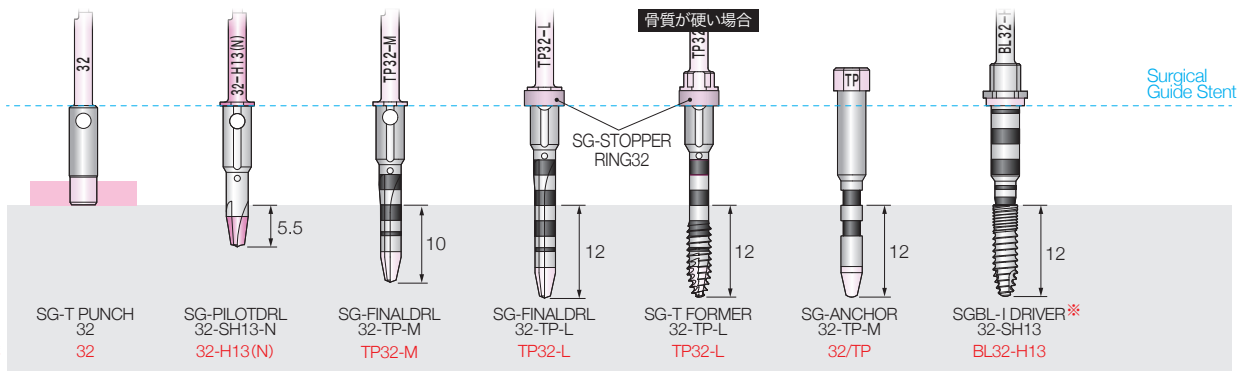商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

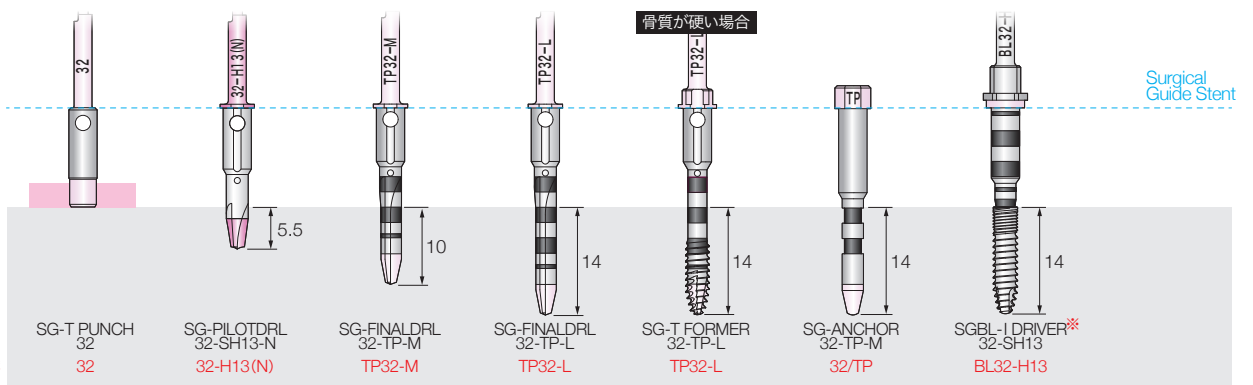商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

Relios 術式チャート

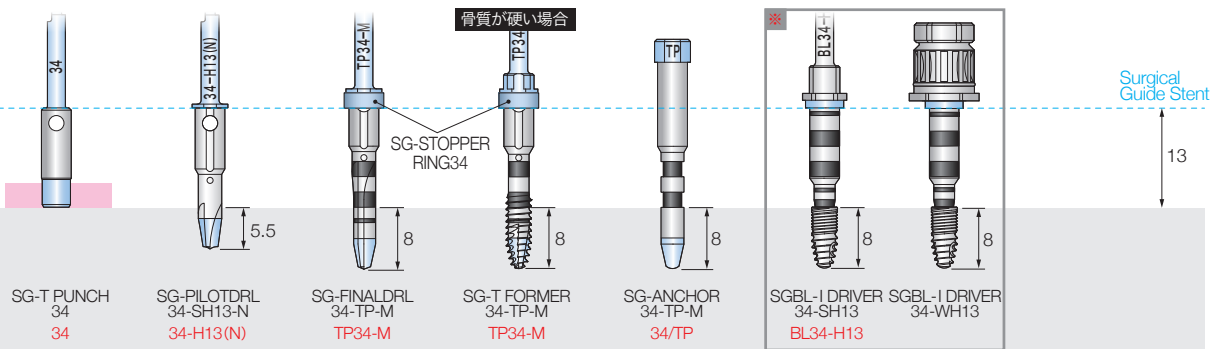
Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.4\text{mm}$

8mm

骨内長


商品名
マーキング表示内容



10mm

骨内長

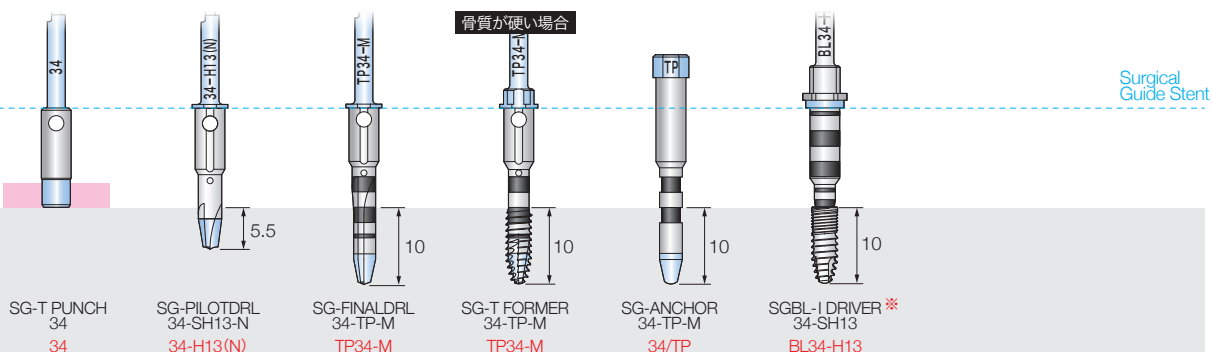
商品名
マーキング表示内容



12mm

骨内長

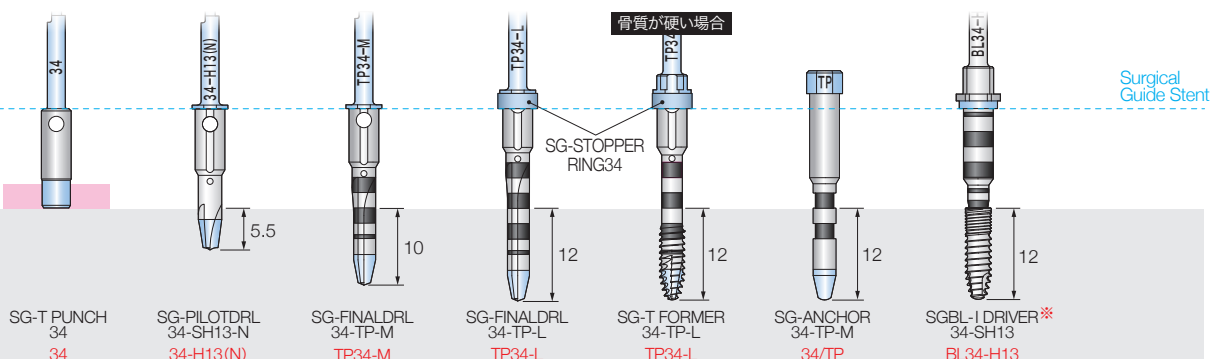
商品名
マーキング表示内容



14mm

骨内長

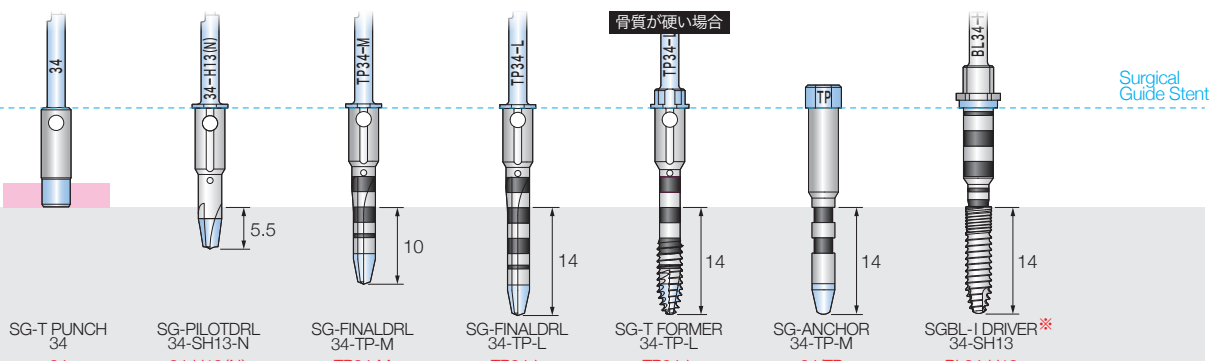商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

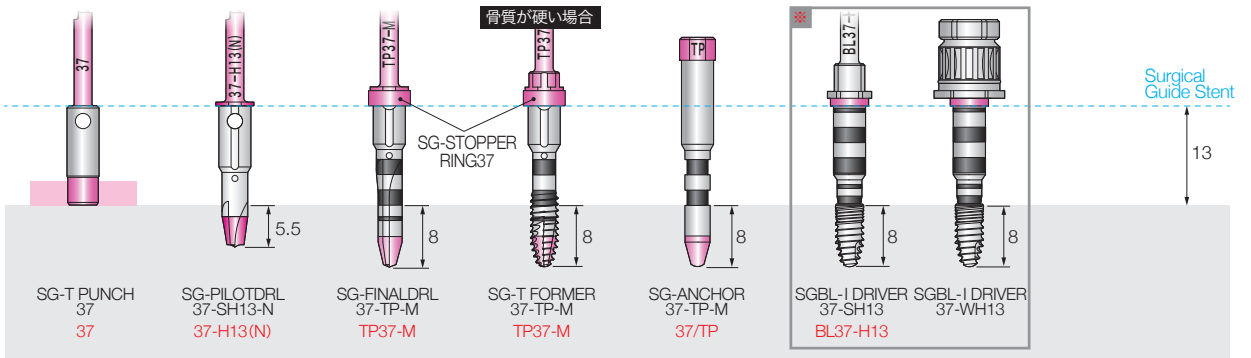
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 3.7\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

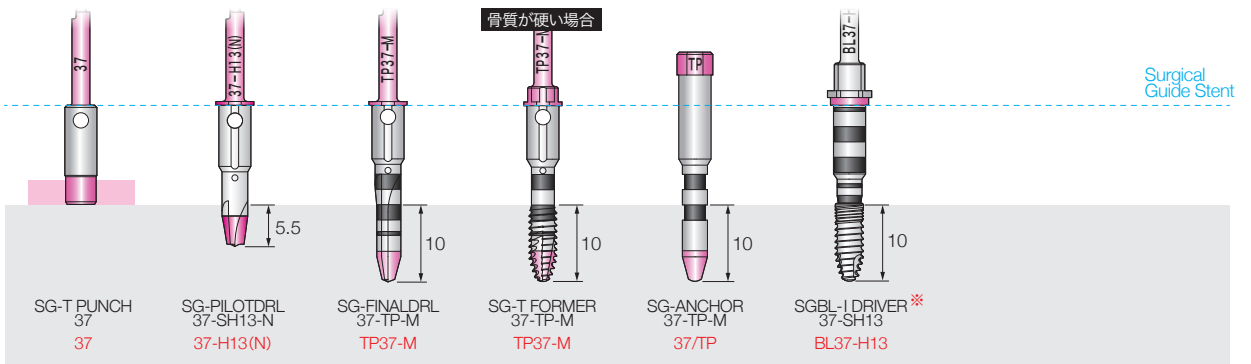商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

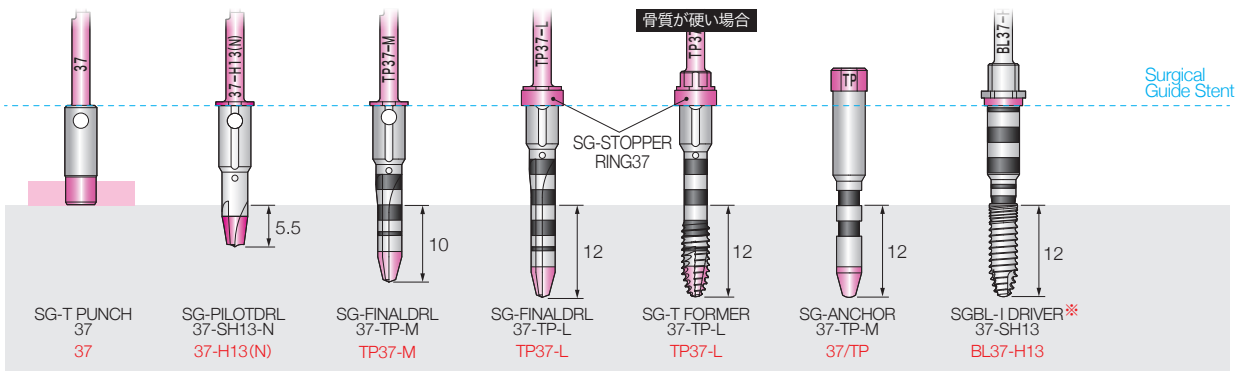商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

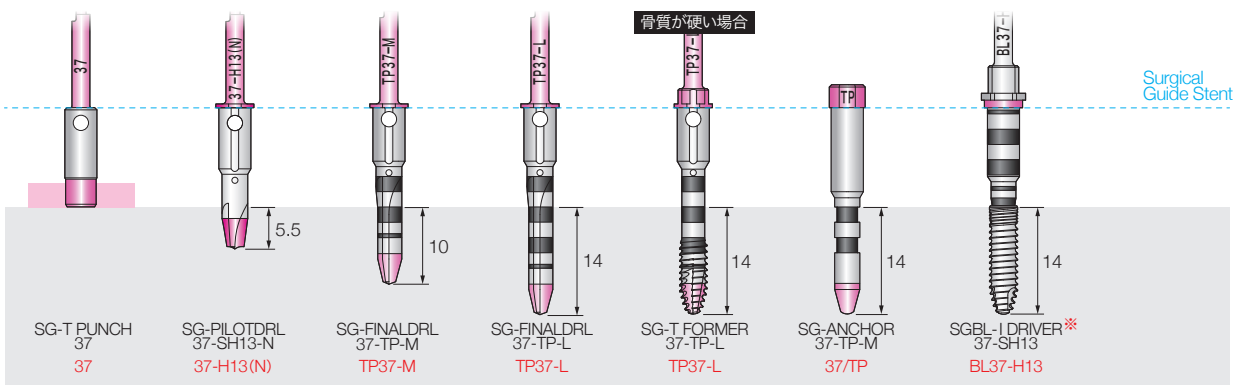商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

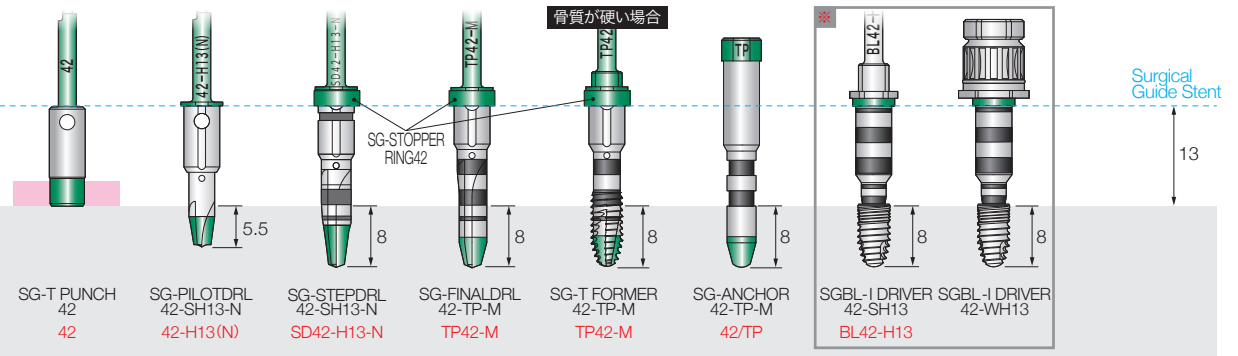
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.2\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

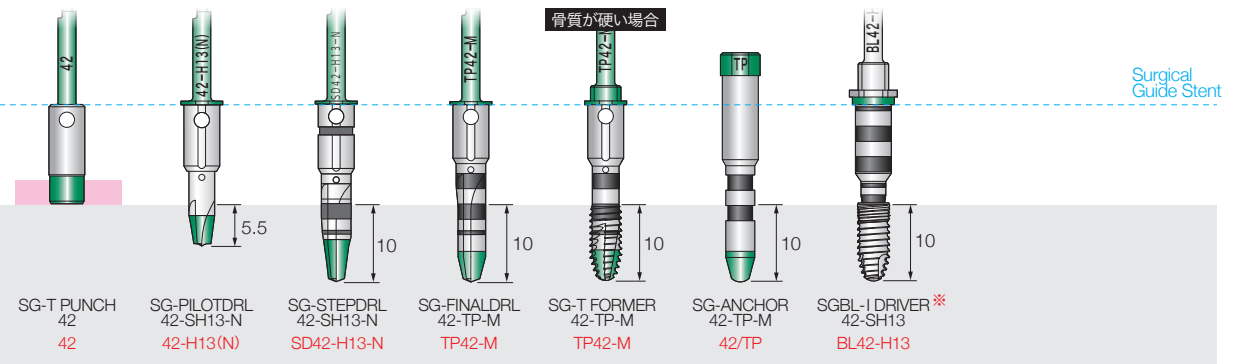商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

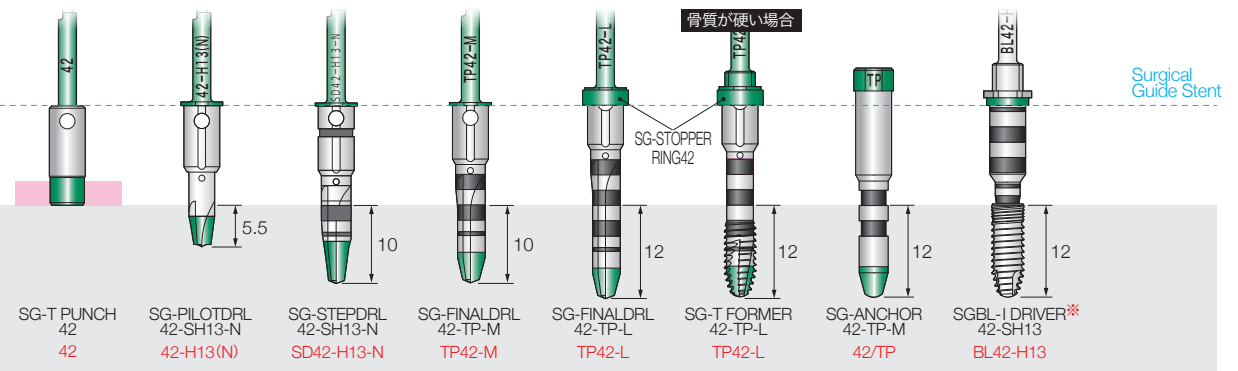商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

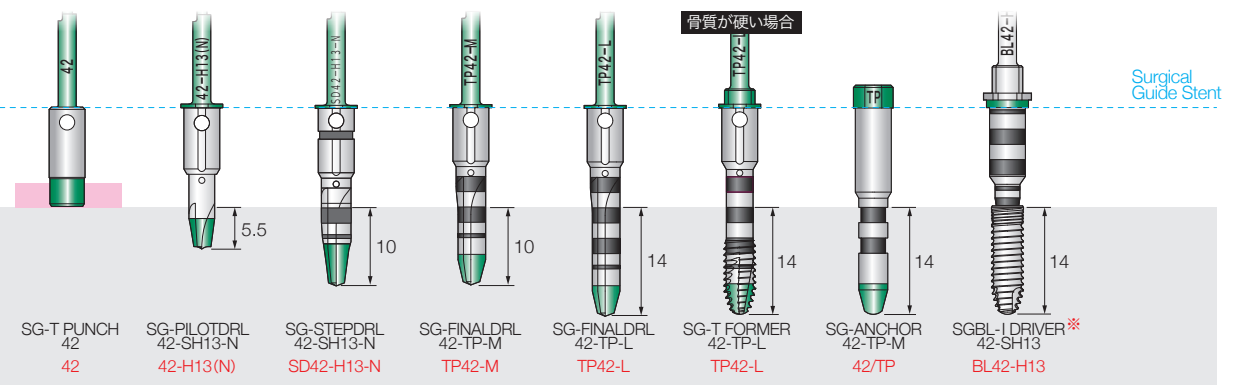商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

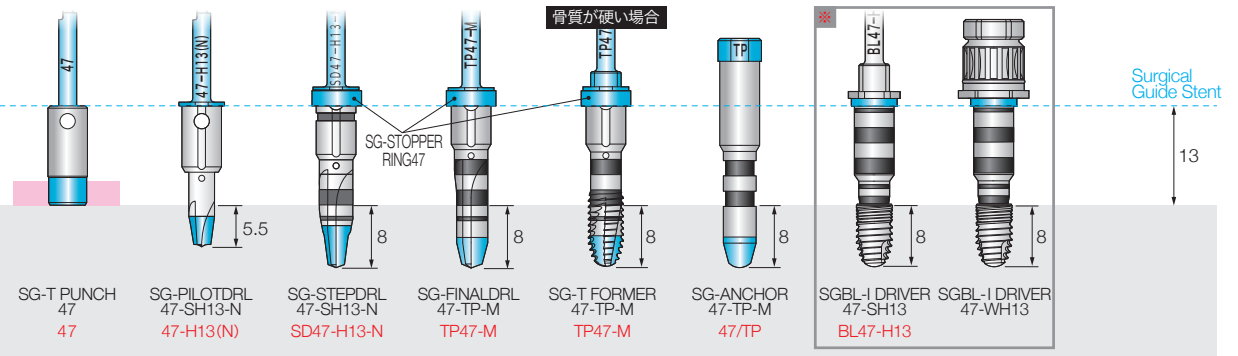
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 4.7\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

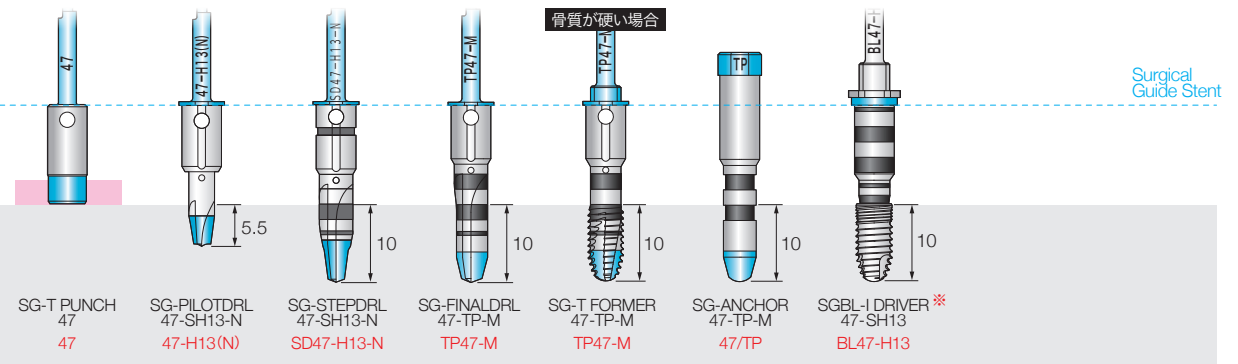商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

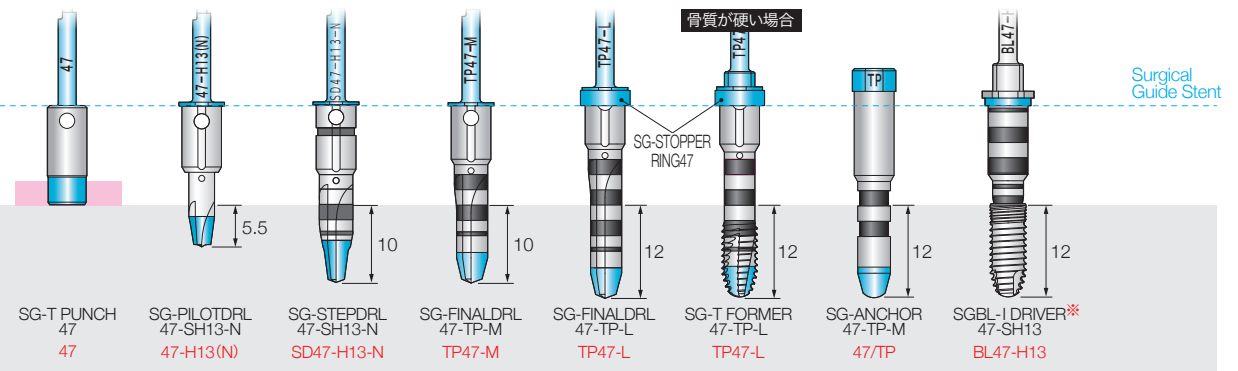商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

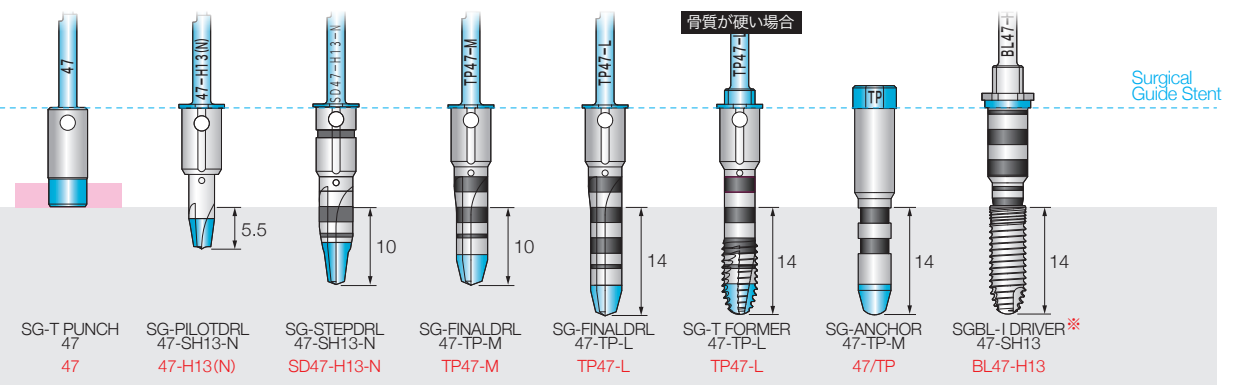商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドシステム用

FINESIA Surgical Guide System

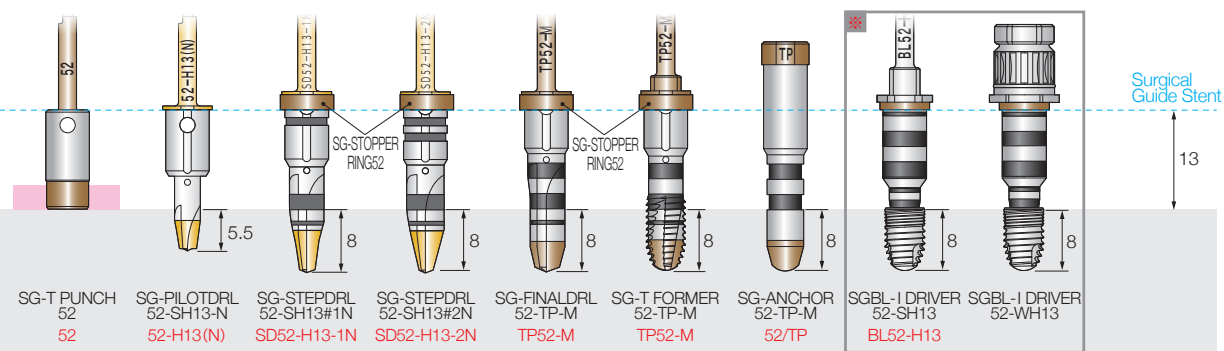
Relios 術式チャート

Tapered type 

インプラント径 $\phi 5.2\text{mm}$


8mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容




10mm
骨内長

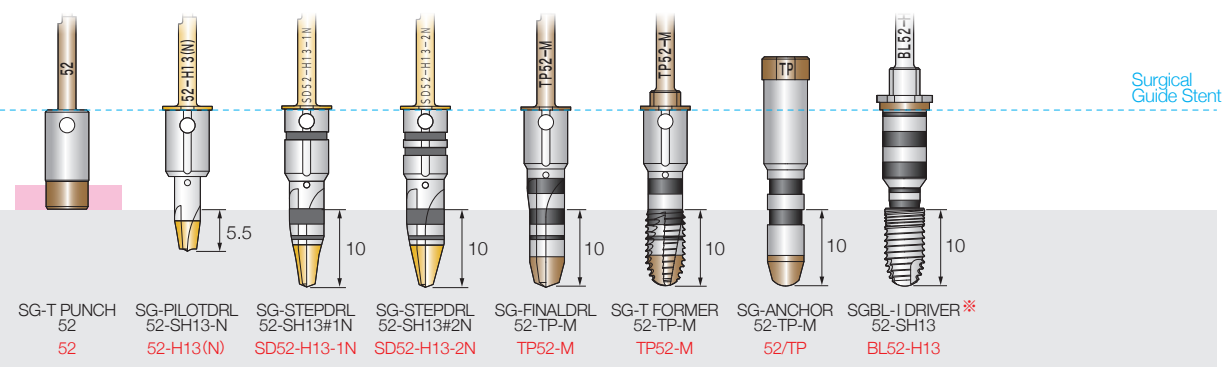商品名
マーキング表示内容




12mm
骨内長

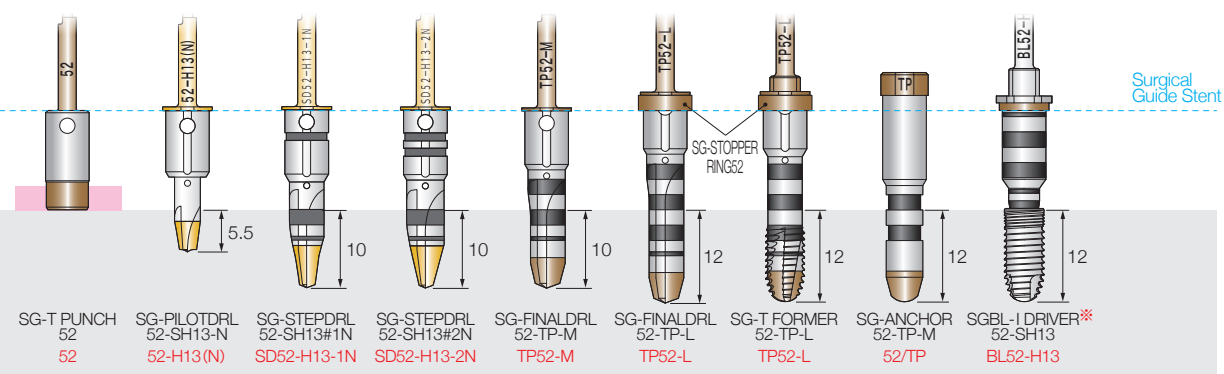商品名
マーキング表示内容



14mm
骨内長

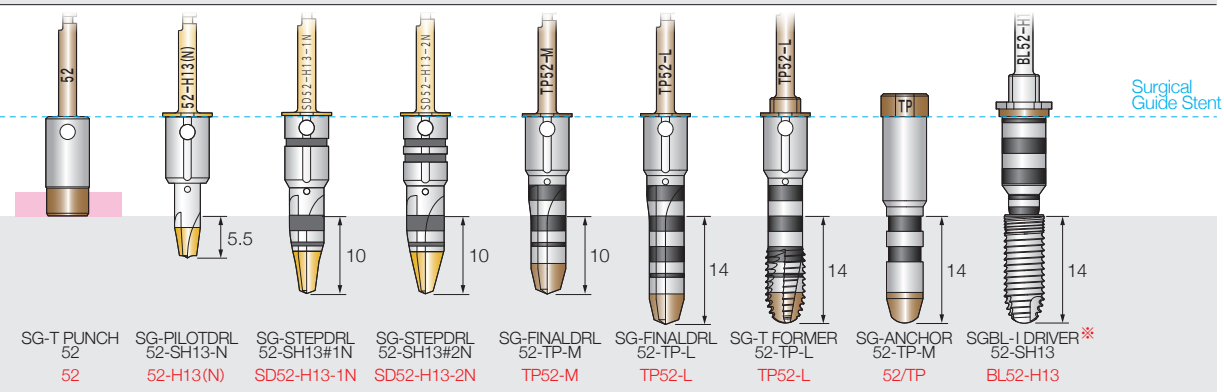商品名
マーキング表示内容



単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	分類	一般的名称	承認 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BLフィクスチャー BE	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	30400BZX00158000	Ⅲ
FINESIA サージカルガイドシステム器具	高度管理医療機器	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101123	Ⅰ
歯科用トルクレンチ	一般医療機器	手術用レンチ	26B1X10012108103	Ⅰ
インプランター Neo Plus ※	管理医療機器	電動式骨手術器械	223ALBZX00027A01	Ⅱ
インプランター Neo Plus2	管理医療機器	電動式骨手術器械	303ALBZX00014A01	Ⅱ

製造販売元：京セラメディカル株式会社

上記インプランター 2種類の製造販売元は株式会社ナカニシです。
※販売終了製品です。

京セラメディカル株式会社

https://www.kyocera-medical.co.jp

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

- 札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525
- 東京営業所 東京都港区三田三丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-8316
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
- 名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。
- 大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157
- 岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289
- 九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

「FINESIA」「Relios」は、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当術式チャートに記載の情報は、2025年10月時点のものです。
当術式チャートについては、無断で複製、転載することを禁じます。