


## BL (ボーンレベル) インプラントドライバー操作時の注意点


(不適切な操作は、インプラントドライバー先端の破折の原因となります)

インプラントドライバーの先端は非常に小さくなっているため、応力の集中によって破折する恐れがあります。BL (ボーンレベル) インプラントドライバーの破折を避け、安全にご使用いただくために、本手順を遵守してください。BL インプラント体の埋入方法についての詳細は、FINESIA『外科用マニュアル』を参照してください。

### ■ 対象製品

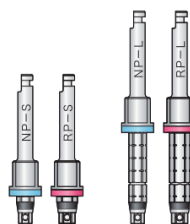

インプラントドライバー CH (NP/RP)

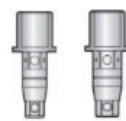


インプラントドライバー WH (NP/RP)


### ■ インプラントドライバーの破折防止策

#### 1. インプラント体にまっすぐ挿入すること。

インプラントドライバーは、奥までまっすぐにインプラント体に挿入してください。ドライバー先端のボールプランジャーがインプラント体の六角部に入ったらドライバーをまっすぐに押し付けてください。容器から取り出したら、ドライバーのマーキング部の下端とインプラント体の上端が一致することを確認し、埋入する間はこの状態を保つようにしてください。

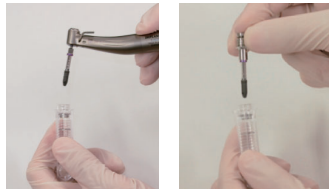


(図1) インプラント体の取り出し

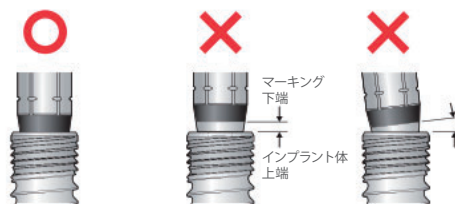

(図2) インプラントドライバーのインプラント体への装着


#### 2. 器具は埋入方向に対して垂直に操作すること。

器具は埋入方向に対して垂直に操作すること。インプラント体の埋入中は、ドライバーはインプラント体に対して垂直になるように保ち、傾けないようにしてください。インプラントドライバーが浮いた状態や傾ける方向に力が加わった場合、過大な負荷がドライバー先端にかかります。開口域が狭い部位への埋入時には特にご注意ください。

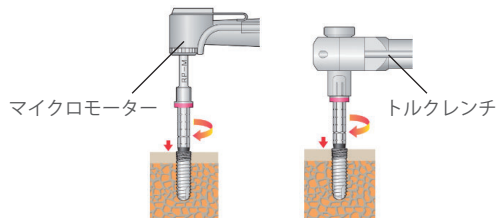

(図3) インプラント体の埋入状態

※埋入トルクの規定値は 50Ncm までとなっています。

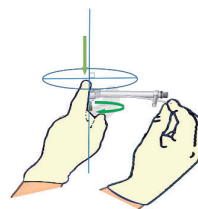

(図4) トルクレンチの使用方法

- ・指で垂直に押さえて、軸がブレないようにしてください。
- ・インプラント体に対して垂直に回転させてください。

販売名: FINESIA インプラント用手術器具 分類: 一般医療機器 一般敬称: 歯科用インプラント手術器具 届出番号: 26B1X10012101122 クラス分類: I  
販売名: 歯科用トルクレンチ 分類: 一般医療機器 一般敬称: 手術用レンチ 届出番号: 26B1X10012108103 クラス分類: I  
製造販売元: 京セラメディカル株式会社

京セラメディカル株式会社  
<https://www.kyocera-medical.co.jp>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525  
東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073 Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560  
名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002 Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560  
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157  
岡山営業所 岡山市北区唐屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289  
九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013 Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。  
当テクニカルレポートに記載の情報は2025年10月時点のものです。  
当テクニカルレポートについては、無断で複製、転載することを禁じます。

