


スクリーリムーバーについて

スクリーリムーバーは、過大な外力等によってアバットメントスクリーが破損して、インプラント体内部にアバットメントスクリーが残存した場合、除去するために使用します。

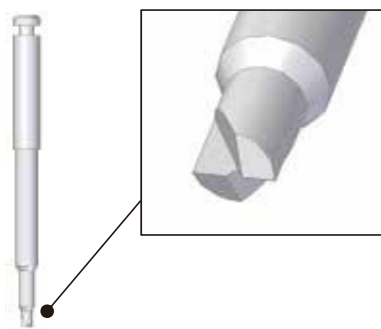


スクリーリムーバーの先端を、残存したアバットメントスクリーに軽く押し当てながら、反時計回りに回転させることでアバットメントスクリーの除去が可能です。

■ 操作方法



○CHアダプタをスクリーリムーバーに装着します。

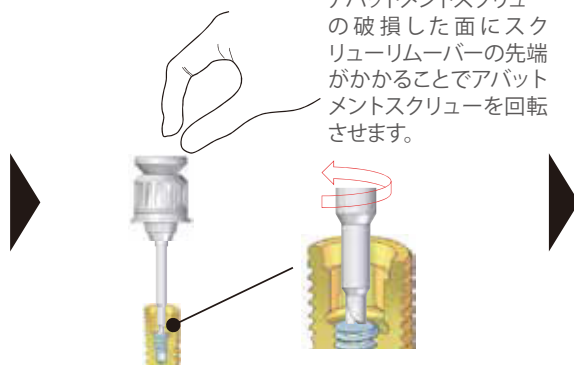

○残存したアバットメントスクリーにスクリーリムーバーを軽く押し当てながら、アバットメントスクリーが完全に浮き上がってくるまで反時計回りに徒手的に回転させます。



○アバットメントスクリーが完全に緩んだのちにピンセットやバキューム等の機器で残存しているアバットメントスクリーを取り除いてください。

注意

- ▶ スクリーリムーバーに過度な力をかけると器具破損の恐れがあります。過度な外力を加えないように操作を行うとともに、使用前にスクリーリムーバーの状態をよく確認し、摩耗や破損が認められた場合には使用を控え、新しいものと交換してください。
- ▶ スクリーリムーバーには把持機構が設けられておりません。アバットメントスクリーの誤飲に注意してください。
- ▶ スクリーリムーバーが斜めに挿入されるとインプラント内部の側面を傷つける恐れがあります。フィクスチャーに対してスクリーリムーバーが垂直になるように操作してください。

(製造販売届出番号) リムーバーキット：26B1X10019106107

歯科用トルクレンチ：26B1X10019108103

