

FINESIA BL インプレッションポスト


BLインプラントはプラットフォームスイッチングデザインのため、印象コーピングの挿入口は細くなっています。

また、印象コーピングの上部の形態は、平面部と曲面部で構成された形状になっています。挿入する際は、平面部が隣接側になるように注意してください。



チェアーサイドからラボサイドに印象を送る際は、頬側に設定された印象コーピングの方向に関する情報を共有してください。

ポスト部の頬側にワックスやレジンを付与すると方向が分かりやすくなります。

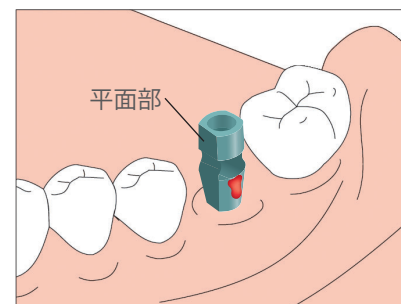

ワックスやレジンを付与する

(医療機器承認番号)

販売名	分類	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BLフィクスチャー ファイナフィックス	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャー	22800BZX00034000	Ⅲ
FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャー	22800BZX00035000	Ⅲ
FINESIA 印象採用器具	一般医療機器	歯科インプラント技工用器材	26B1X10012102115	I

京セラメディカル株式会社

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

製造販売元：京セラメディカル株式会社

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525
 東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073 Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
 名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002 Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157
 岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289
 九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013 Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。
 本資料に記載の情報は2025年10月時点のものです。
 本資料については、無断で複製、転載することを禁じます。

© 2025 KYOCERA Medical Corporation

1_071 [D-140-2t]



www.finesia.world