

破折したアバットメントスクリューの除去方法

スクリューの破折片を除去するには下記の方法をお試しください。

① 探針など先端の鋭利な
インスツルメントを使用する。




② 超音波スケーラーを使用する。



③ 破折片にグルーブを形成して、
マイナスドライバーを使用する。



注意点：
・インプラント体内部を決して傷付けないように注意し、傷が付いていないか確認してください。
・新しいアバットメントスクリューを試適し、スムーズにねじ込めることを確認してください。
・内部の状態により適正なトルクで締め込めない場合があります。

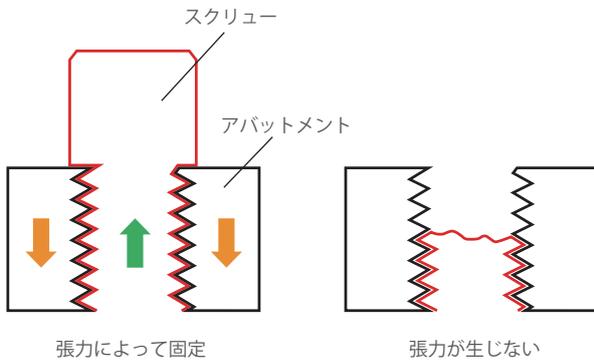

アバットメントとスクリューは張力により固定されていますが、破折により頭部を失ったものには加わっていないため、基本的には残存部を反時計方向に回転することで除去可能であることが多いといわれています。

「SAFE Troubleshooting Guide Volume 1(P.39)」
(クインテッセンス出版株式会社) より

(医療機器承認番号)

販売名	分類	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA BLフィクスチャー ファイナフィクス	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00034000	Ⅲ
FINESIA BLフィクスチャー ファイナタイト	高度管理医療機器	歯科用インプラントフィクスチャ	22800BZX00035000	Ⅲ
FINESIA BLアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22800BZX00036000	Ⅲ
FINESIA BLチタンベースアバットメント	高度管理医療機器	歯科用インプラントアバットメント	22900BZX00097000	Ⅲ

京セラメディカル株式会社
https://www.kyocera-medical.co.jp

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

製造販売元：京セラメディカル株式会社

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525
東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号(住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073 Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560
名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002 Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157
岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289
九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト6F) 〒812-0013 Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

「FINESIA」は京セラメディカル株式会社の登録商標です。
本資料に記載の情報は2025年10月時点のものです。
本資料については、無断で複製、転載することを禁じます。



www.finesia.world